

Dexcom Clarity (app)

Gegevens automatisch delen met de zorgverlener*

Dexcom ONE+/G7


Dexcom G6



Open de Dexcom ONE+/G7 app.
Ga naar **Verbindingen** en tik op **Clarity Clinic**.



Open de Dexcom Clarity app.
Ga naar **Gegevens delen beheeren**.

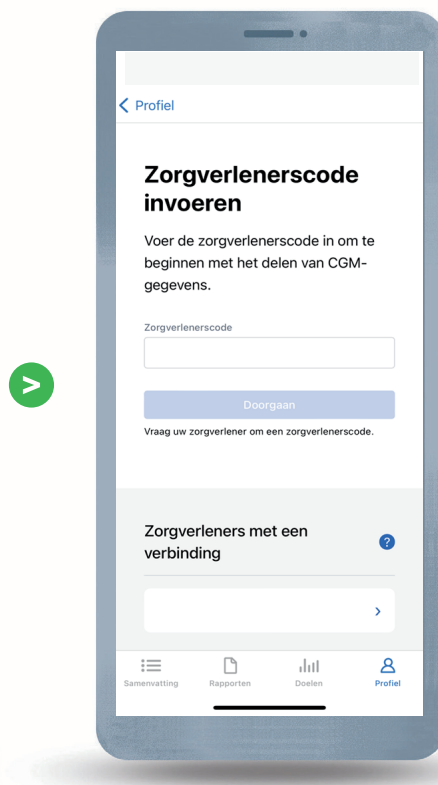

Vraag de zorgverlener om de zorgverlenerscode en vul in

Dexcom Clarity

Download de Dexcom Clarity app of bezoek Dexcom Clarity via: clarity.dexcom.eu om uitgebreide rapporten en statistieken van uw glucosedata te bekijken.

Tip: Via het tabblad **glucose** in uw Dexcom ONE+ app vindt u alvast een Clarity samenvatting met de meest relevante statistieken.



Log in met dezelfde inloggegevens als uw andere Dexcom-app of maak een nieuw account aan.

*De patiënt moet eerst zijn Dexcom CGM-gegevens synchroniseren met Dexcom Clarity en toestemming geven om zijn gegevens te delen met zijn zorgverlener. Een internetverbinding is vereist voor patiënten om hun glucosegegevens naar Dexcom Clarity te sturen via een compatibel smart apparaat: dexcom.com/compatibility.