
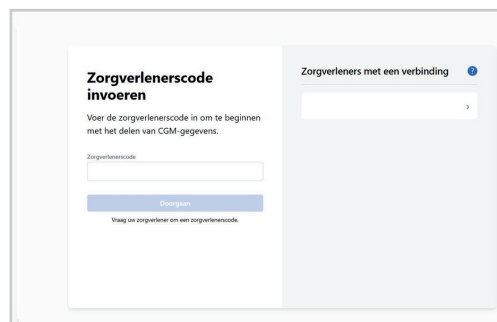


Dexcom Clarity (ontvanger)

Gegevens delen met de zorgverlener*

Uw zorgverlener moet u de kliniecode geven om te beginnen met het delen van gegevens. Volg de instructies en geef de kliniek toestemming om toegang te krijgen tot uw gegevens.¹

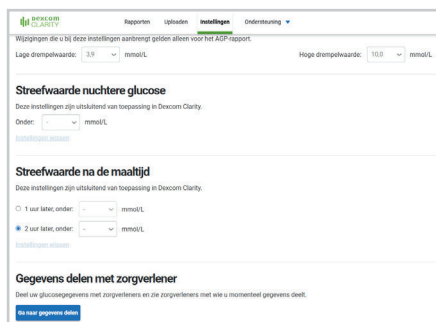

Ga naar **Instellingen** en scroll naar beneden tot **Gegevens delen met zorgverlener**, klik dan op **Ga naar gegevens delen**

Vraag de zorgverlenerscode aan de zorgverlener en vul deze in.

Bezoek Dexcom Clarity op: **clarity.dexcom.eu** om de glucosegegevens van je ontvanger naar je Clarity-account te uploaden, zodat je je voortgang kunt volgen en gegevens kunt delen met je zorgverlener.

Gaat je zorgverlener dit voor je doen? Neem de ontvanger mee naar de afspraak. De zorgverlener kan de ontvanger ook uitlezen in de zorginstelling.

Selecteer **Dexcom Clarity voor thuisgebruikers** en log in met een bestaand Dexcom-account of maak een nieuw account aan.

1


Ga naar **Uploaden**.

2

Klik op **Downloaden** en volg de instructies op het scherm om de software te installeren.



Verbind de ontvanger met de computer om glucosedata van de ontvanger te uploaden.

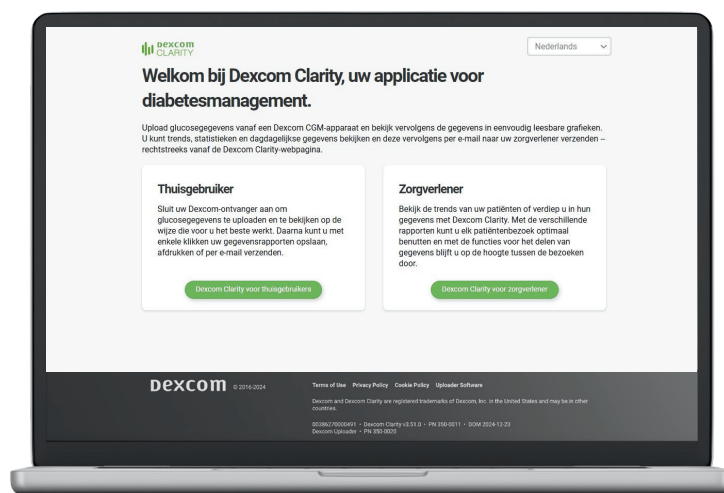

Voor toekomstige uploads hoeft u alleen de ontvanger aan de computer te verbinden.

¹ De patiënt moet toestemming geven om hun gegevens te delen met hun zorgverlener.

* Een internetverbinding is vereist voor patiënten om hun glucosegegevens naar Dexcom Clarity te sturen via: clarity.dexcom.eu.