

Direct to Watch

G7


Smartwatch Opties

Er zijn twee manieren waarop een gebruiker een smartwatch kan instellen:


- **Direct to Watch-modus (alleen Apple Watch):**
De smartwatch krijgt informatie van de sensor, net als de telefoon. Je kan je telefoon achterlaten indien gewenst.
- **Standaard Smartwatch-modus:**
De smartwatch kopieert informatie van de telefoon, niet van de sensor. Je moet jouw telefoon in de buurt houden.

Afhankelijk van de smartwatch kun je de Direct to Watch-modus, de Standaard Smartwatch-modus, een van beide of geen van beide instellen. Ga naar dexcom.com/compatibility om te zien welke smartwatches worden ondersteund.

Deze slides gaan over Direct to Watch.

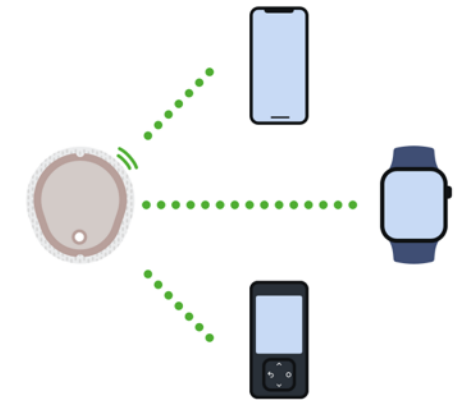

Direct to Watch

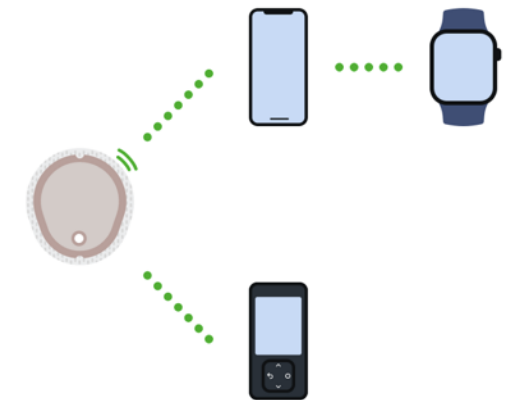

Standaard Smartwatch

Direct to Watch Instellen

Om Direct to Watch te gebruiken, moet je dit instellen.

Ga in de Dexcom G7-app naar **Verbindingen > Direct to Watch**. Volg daarna de instructies op het scherm.

De smartwatch laadt de app. Als dit niet gebeurt, moet je de watch app op de telefoon openen. Ga in het tabblad Mijn horloge naar de lijst Beschikbare apps en Installeer.

Je moet de juiste versie van de Apple Watch en watchOS* hebben.

*Weergaveapparaten worden apart verkocht. Ga voor een lijst met compatibele smartapparaten naar www.dexcom.com/compatibility




Direct to Watch kaart in Verbindingen

- Geeft korte overzicht
- Tik voor meer informatie



Vereisten check (gefaald)


- De app controleert of de gebruiker de juiste versie van de Apple Watch en watchOS heeft.
- Als de controle mislukt, biedt de app hulp bij het oplossen van het probleem.

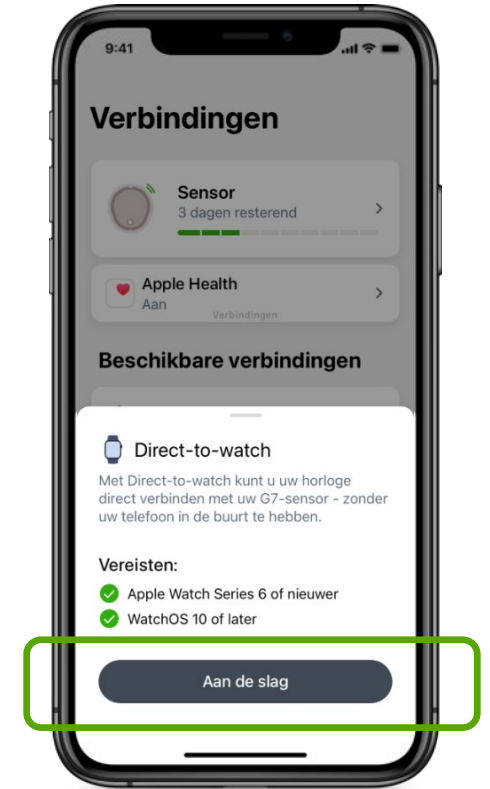

Vereisten check (geslaagd)

- Knop wordt beschikbaar om Direct to Watch onboarding te starten

Direct to Watch Onboarding

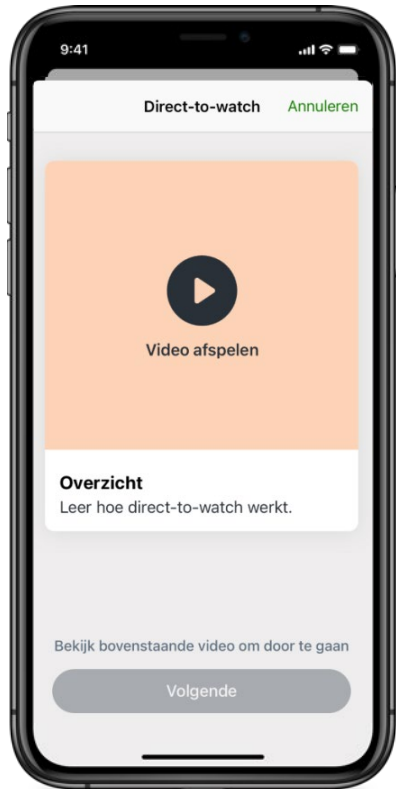

Onboarding 1: Video

- Overzicht hoe Direct to Watch werkt



Onboarding 2: Gedwongen afsluiten

- Waarschuwing de app altijd geopend te houden



Onboarding 3: Delen

- Delen is niet beschikbaar voor het horloge. Je moet je telefoon in de buurt houden om gegevens met volgers te delen.



Onboarding 4: Nieuwe sensor starten

- Legt uit dat je de sensor eerst met de telefoon moet koppelen, dan probeert de app met het horloge te koppelen. Dat kan tot 5 minuten duren.
- Nadat je op Volgende klikt, is Direct to Watch onboarding voltooid en de functie is actief.



Voor het eerst koppelen



Horloge zoekt naar sensor

- Sensor is actief (en al met telefoon gekoppeld)
- Het horloge probeert met de sensor te koppelen

Koppelerzoek

- Je wordt door Apple verzocht om de koppeling te bevestigen

1^{ste} koppeling bevestigen

- Bevestiging eerste Direct to Watch koppeling

Hulp Trendgrafiek

- Legt uit hoe het tijdvenster van de trendgrafiek aangepast kan worden

App overzicht

- Je bent met sensor verbonden en ontvangt gegevens

Dexcom Watch App



De Dexcom watch app toont een nummer, een pijl en een trendgrafiek. Deze toont de sensormetingen van de afgelopen 1, 3 of 6 uur. De gebruiker kan op de grafiek tikken om van tijdvenster te veranderen.

1. Sensorwaarde
2. Trendpijl
3. Tijdvenster (1, 3, of 6 uur)
4. Waarschuwing hoge glucose
5. Waarschuwing lage glucose
6. Trendgrafiek
7. Huidige sensorwaarde (groter punt rechts)

Direct to Watch Waarschuwingen

Gebruikers ontvangen waarschuwingen en alarmen zonder hun telefoon in de buurt te hebben. Je kunt waarschuwingen en alarmen op je smartwatch bevestigen.

Als je bijvoorbeeld jouw horloge draagt en naar buiten gaat, maar je telefoon thuis laat, zul je nog steeds waarschuwingen en alarmen ontvangen en deze kunnen bevestigen.



Standaard Smartwatch modus vs Direct to Watch



Grijs icoontje:
Wordt getoond
als Standard
Smartwatch
modus actief is



Geen icoontje:
Direct to
Watch is
ingeschakeld
en actief

Direct to Watch Uit – Data vanuit telefoon

- Standaard Smartwatch mode view heeft nu een grijs telefoon icoontje boven rechts
- Als je erop tikt laat een bericht zien dat je de telefoon in de buurt moet houden om metingen en waarschuwingen te ontvangen
- Het laat ook weten dat Direct to Watch geactiveerd kan worden in de Verbindingstab van de app

Direct to Watch Aan - Data vanuit sensor

- Direct to Watch is aan en werkt als verwacht. Horloge is aan sensor gekoppeld. Glucosewaarden en waarschuwingen komen rechtstreeks van de sensor.
- Geen telefoon icoontje getoond

Data vanuit telefoon en signaalverlies

Oranje
Icoontje:
Direct to
Watch modus
werkt tijdelijk
niet



Data vanuit telefoon

- Direct to Watch is ingeschakeld. Horloge is met sensor verbonden, maar gegevens en waarschuwingen komen vanuit de telefoon.
- Door op het oranje telefoonicoontje te tikken, wordt in een bericht uitgelegd dat Direct to Watch tijdelijk niet werkt en dat je jouw telefoon in de buurt moet houden om metingen en waarschuwingen te ontvangen.




Tik voor tips
voor probleem-
oplossing

Signaalverlies

- Direct to Watch is ingeschakeld. Horloge is met sensor verbonden maar heeft signaalverlies.
- Door op de signaalverlies banner te tikken krijg je een bericht met tips voor het oplossen van problemen met het horloge.

Nieuwe sensor koppelen

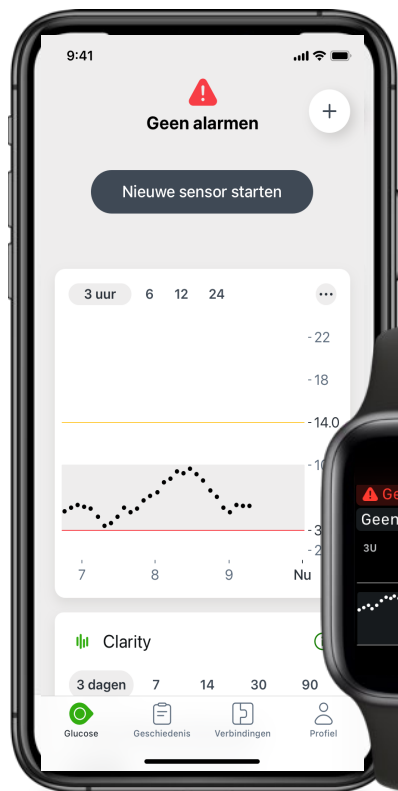

Geen sensor actief

- Direct to Watch is aan
- Tik op "Nieuwe sensor starten"



Telefoon zoekt naar sensor

- Direct to Watch kaart verschijnt in de Glucose-tab om uit te leggen dat het horloge wacht op de koppeling met telefoon
- Telefoon ontvangt Apple Bluetooth koppelverzoek welke de gebruiker bevestigt



Telefoon gekoppeld, horloge zoekt...

- Geupdated tekst als Direct to Watch aan is
- Laat weten dat de telefoon gekoppeld is met de sensor en dat het horloge probeert te koppelen
- Horloge begint sensor te zoeken



Horloge gekoppeld

- Horloge ontvangt Apple Bluetooth koppelverzoek welke de gebruiker bevestigt
- Zodra ze gekoppeld zijn, tonen beide apparaten een countdown voor de resterende opwarmtijd.

Instellingen wijzigen

Open de watch app terwijl je de instellingen wijzigt:
De watch app kopieert instellingen van de telefoon app.

Wanneer je jouw Dexcom G7-instellingen wilt wijzigen, moet je de app openen en weergeven op je horloge terwijl jouw telefoon in de buurt is om ervoor te zorgen dat de instellingen naar de smartwatch worden gekopieerd.



Tips voor gebruikers

Meldingen toestaan in de Focusmodus: Beheer de instellingen van de telefoon om Dexcom-meldingen toe te staan.

Sensor vervangen: Als je een nieuwe sensor start, vraagt de telefoonapp je om je sensor te koppelen met je smartwatch.

Van smartwatch wisselen: Je kunt de sensor maar aan één smartwatch tegelijk koppelen.

Batterijduur horloge

Het gebruik van Direct to Watch kan invloed hebben op de levensduur van de batterij van het horloge en op de oplaadtijd (zie de documentatie van Apple voor meer informatie <https://www.apple.com/watch/battery/>)