


Partager des données avec votre professionnel de la santé[‡]

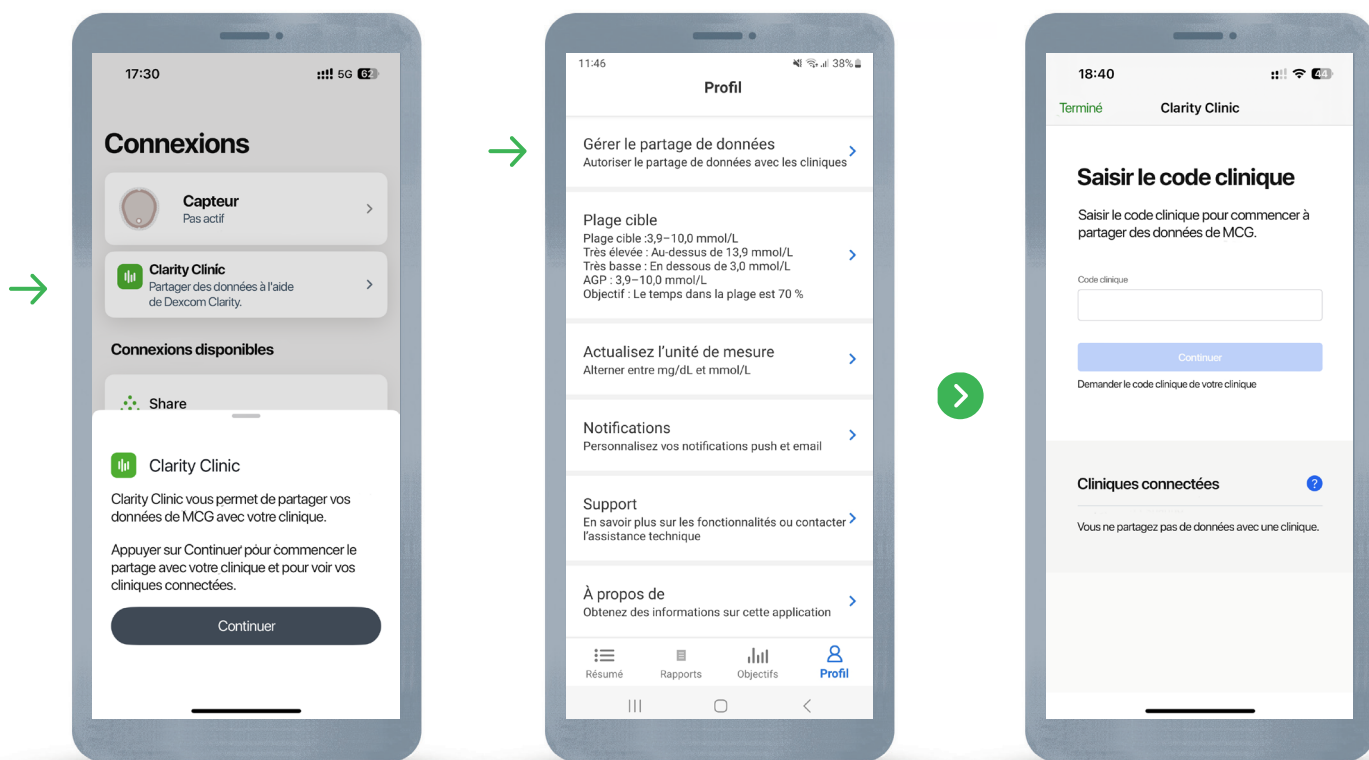

Ouvrir l'application Dexcom G7. Aller sur **connexions** et appuyer sur **Clarity Clinic**.

Ouvrir l'application **Dexcom Clarity**. Aller sur **Gérer le partage de données**.

Demandez le code clinique à votre professionnel de la santé et saisissez-le.

Dexcom Clarity

Télécharger l'application Dexcom Clarity ou consulter Dexcom Clarity à l'adresse **clarity.dexcom.eu** pour visualiser des rapports détaillés et des statistiques de vos données de glucose.

Conseil : Dans l'onglet **glucose** de votre application Dexcom G7, vous trouverez déjà un récapitulatif Clarity avec les statistiques les plus pertinentes.



Se connecter en utilisant les mêmes identifiants que ceux de votre autre application Dexcom ou créer un nouveau compte.

[‡] Les utilisateurs doivent d'abord synchroniser leurs données de MCG Dexcom avec l'application Dexcom Clarity et accepter de partager leurs données avec leur professionnel de la santé. Une connexion internet est requise pour que les utilisateurs envoient leurs données de glucose à Dexcom Clarity à l'aide d'un appareil connecté compatible : dexcom.com/compatibility