
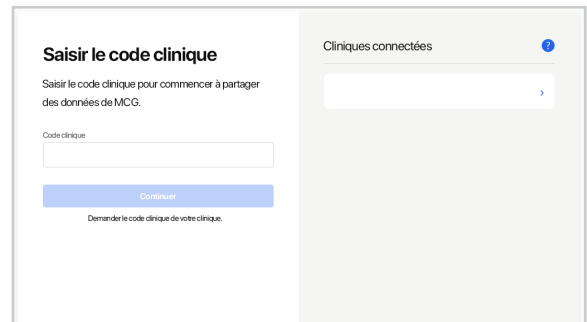


# Dexcom Clarity (récepteur)

## Partage des données avec votre professionnel de la santé<sup>‡</sup>

Votre professionnel de la santé doit vous fournir le code de la clinique pour commencer le partage des données. Suivre les instructions et autoriser la clinique à accéder à vos données<sup>1</sup>.

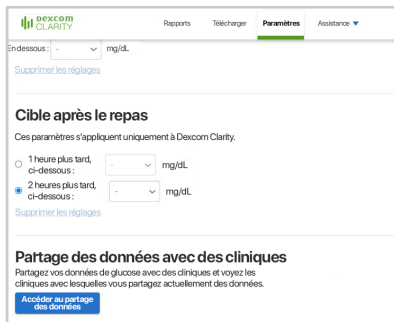

Aller sur **Paramètres** et faire défiler vers le bas jusqu'à **Partage des données avec des cliniques**, puis cliquer sur **Accéder au partage des données**

Demandez le code clinique à votre professionnel de la santé et saisissez-le.

Consultez Dexcom Clarity à l'adresse : [clarity.dexcom.eu](https://clarity.dexcom.eu) pour télécharger vos données de glucose depuis votre récepteur vers votre compte Clarity pour pouvoir suivre vos progrès et partager les données avec votre professionnel de la santé.

### Votre professionnel de la santé va le faire pour vous ?

Prenez votre récepteur avec vous à votre prochain rendez-vous. Le professionnel de la santé peut également lire le récepteur dans l'établissement de santé.

Choisir **Dexcom Clarity pour les particuliers** et se connecter avec un compte Dexcom existant ou créer un nouveau compte.

1

Aller sur **Télécharger**.

2

Cliquer sur **Télécharger** et suivre les instructions à l'écran pour installer le logiciel.



**Connecter** votre récepteur à votre ordinateur pour télécharger les données de glucose de votre récepteur.



Pour les téléchargements ultérieurs, il vous suffira de connecter votre récepteur à votre ordinateur.

<sup>1</sup> Les utilisateurs doivent accepter de partager leurs données avec leur professionnel de la santé. <sup>‡</sup> Une connexion internet est requise pour que les utilisateurs envoient leurs données de glucose à Dexcom Clarity à l'aide de [clarity.dexcom.eu](https://clarity.dexcom.eu).