

DexcomG7

Aan de slag

Dit zijn beknopte instructies. Raadpleeg de gebruiksaanwijzingen voor gedetailleerde, stapsgewijze instructies voor het gebruik van het Dexcom G7-systeem voor continue glucosemeting (CGM).
Schermafbeeldingen dienen alleen ter illustratie. Uw product kan er anders uitzien.

Welkom!

Vandaag behandelen we het volgende:

- De juiste verwachtingen
- Dexcom G7-app instellen
- De sensor inbrengen
- Waarschuwingen en functies van de Dexcom G7-app
- De sensor verwijderen
- En meer




De kracht van Dexcom G7

- Real time glucose metingen elke vijf minuten
- Inzicht in trends en patronen
- Helpt actie te ondernemen om hoge of lage glucosewaarden te voorkomen
- Zonder vingerprikken* beslissingen kunnen nemen over uw diabetesbehandeling
- Deel waarden live met uw dierbaren †

*Als uw glucosewaarschuwingen en -waarden van de G7 niet overeenkomen met symptomen of verwachtingen, moet u een bloedglucosemeter gebruiken om behandelbeslissingen te nemen.

† Internetverbinding vereist voor het delen van gegevens. Voor het delen van gegevens is het gebruik van de Follow-app vereist. Volgers dienen waarden altijd te bevestigen in de Dexcom G7-app of op de ontvanger voordat er behandelbeslissingen worden genomen.

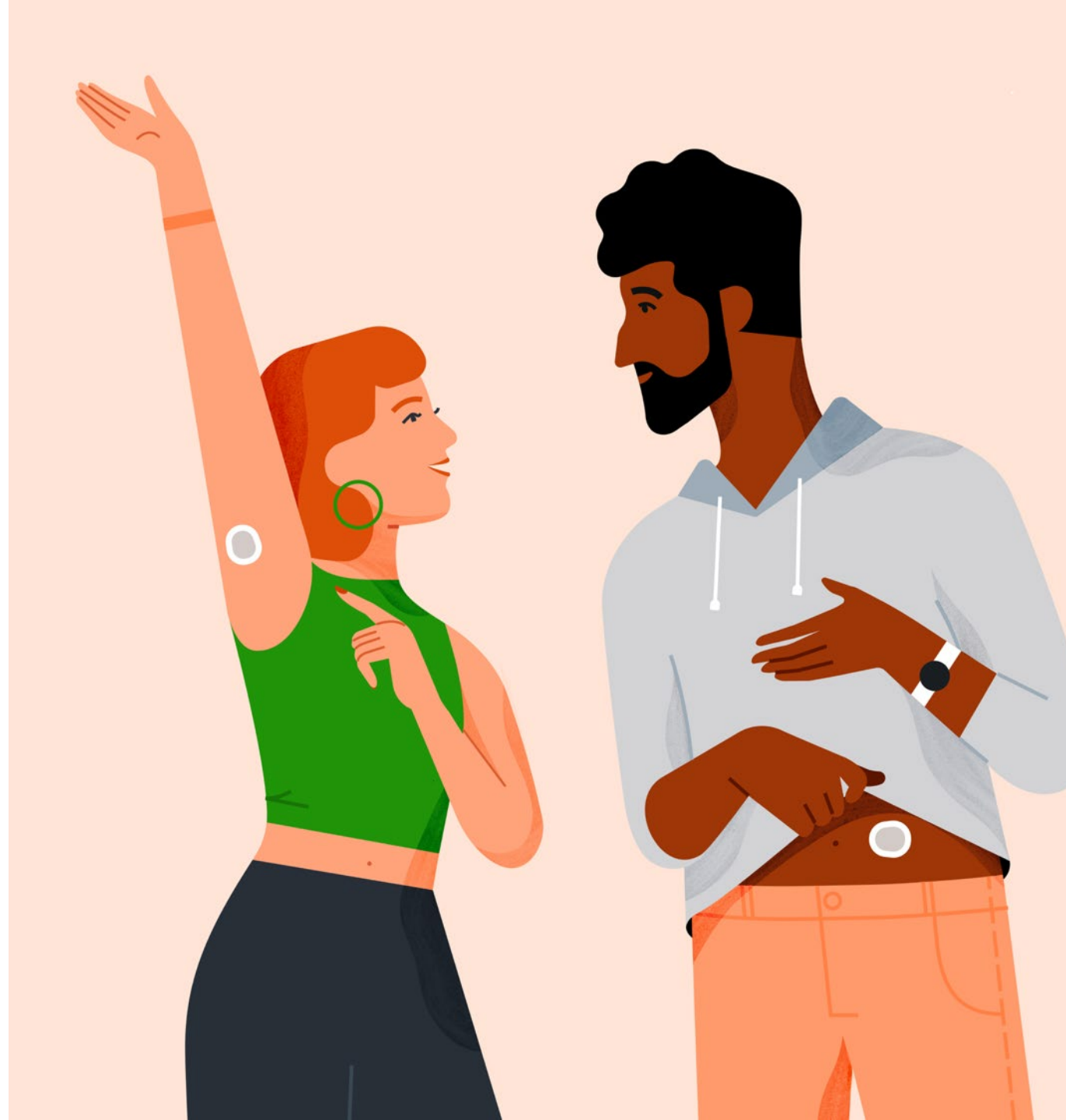


De juiste verwachtingen


- Dexcom G7 meet de glucose waarden in de **interstitiële vloeistof** net onder de huid.
- **Bloedglucosemeters** meten glucose waarden in het **bloed**.

Omdat glucose zich van het bloed naar het interstitiële vocht verplaatst, verandert uw glucose in het bloed iets eerder dan in uw interstitiële vocht.

- Meetwaarden kunnen verschillen en toch als nauwkeurig worden beschouwd.

Opmerking: Het verschil tussen de metingen van uw meter en die van de Dexcom G7 kan groter zijn wanneer u een nieuwe sensor plaatst. Over het algemeen komen de metingen de eerste 24 uur dicht bij elkaar.

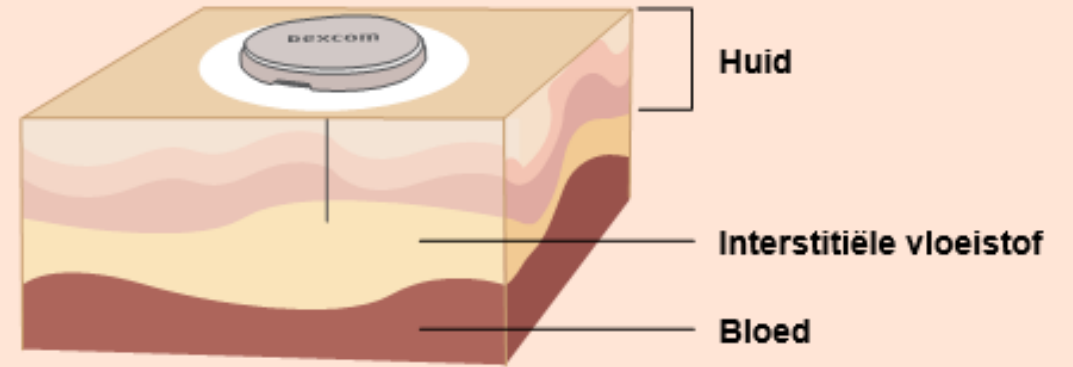

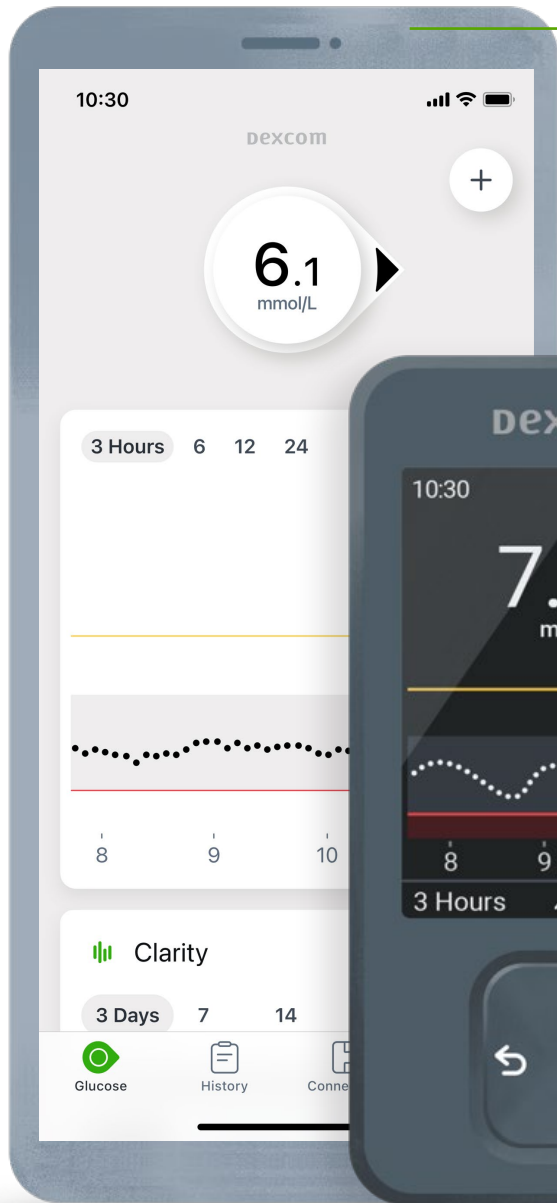

Dexcom G7-app

- Geeft glucose-informatie weer
- Ga voor een lijst met compatibele apparaten naar: dexcom.com/compatibility



Dexcom G7-ontvanger (optioneel)

- Geeft glucose-informatie weer
- Kan worden opgeladen met de meegeleverde USB-kabel



Apple Watch (niet inbegrepen)

- Geeft glucose-informatie weer (met of zonder smartphone)



Applicator met ingebouwde sensor

- De applicator brengt de sensor in onder uw huid
- De sensor meet glucose
- De sensor kan tot 10 dagen lang gedragen worden
- De sensor stuurt glucose-informatie naar de Dexcom G7-app

Smartphone niet inbegrepen.

Maak kennis met de Dexcom-apps



Dexcom G7-app

- **Wie gebruikt deze app?** Degene die de Dexcom G7 draagt.
- **Wat doet deze app?** Geeft de glucose-informatie van de gebruiker weer.



Dexcom Clarity-app*

- **Wie gebruikt deze app?** Dexcom G7-gebruiker die de sensor draagt.
- **Wat doet deze app?** Hij laat u belangrijke statistieken inzien, rapporten aanmaken en gegevens delen met uw ziekenhuis.



Dexcom Follow-app†

- **Wie gebruikt deze app?** Iemand die de gegevens van de Dexcom G7-gebruiker wil bekijken. Voorbeelden: ouders, partner of verzorgers.
- **Wat doet deze app?** Hij laat iemand de glucosespiegels en -trends van een dierbare bekijken en bijhouden.


* Gebruiker moet eerst Dexcom G7 data synchroniseren met Dexcom Clarity app en gegevens delen met zorgverlener toestaan. Internetverbinding vereist om gegevens via een compatibele smartphone te delen met Dexcom Clarity: dexcom.com/compatibility.

† Internetverbinding vereist voor het delen van gegevens. Voor het delen van gegevens is het gebruik van de Follow-app vereist. Volgers dienen waarden altijd te bevestigen in de Dexcom G7-app of op de ontvanger voordat er behandelbeslissingen worden genomen.

De Dexcom G7-app installeren


Download de Dexcom G7-app in uw
appstore.

Ga voor een lijst met compatibele
apparaten naar dexcom.com/compatibility.

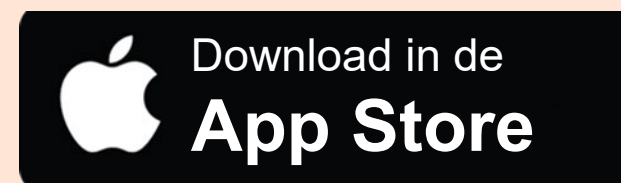

Inloggen



Log in met een bestaand Dexcom-account
of maak een nieuw account aan.

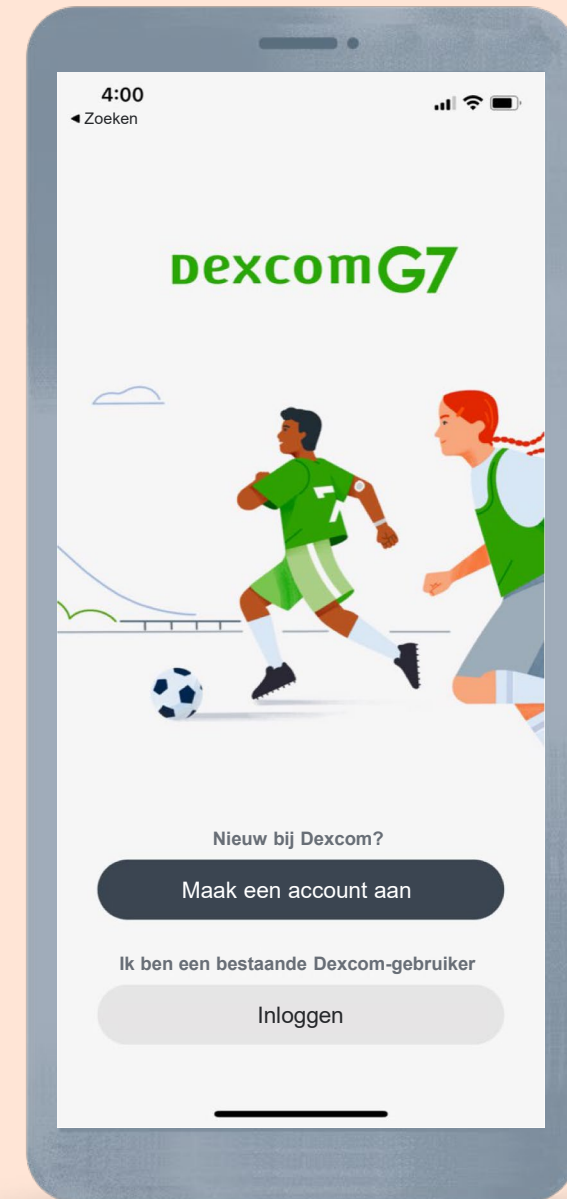

Nieuw Dexcom-account en afhankelijk account

Selecteer **Aanmelden** en vervolgens **Nieuw Dexcom-account** om een Dexcom-account te maken. Volg de instructies op het scherm om uw account te maken.

Als u een account wilt instellen voor een afhankelijke, moet u eerst een hoofdaccount maken. Dit kan in de app worden gedaan of online op dexcom.com/nl-NL. Zodra uw hoofdaccount is aangemaakt, heeft u de mogelijkheid om een afhankelijk account te maken. U kunt de informatie van het afhankelijke account vervolgens gebruiken om in te loggen op de Dexcom G7-app op de telefoon van de afhankelijke.

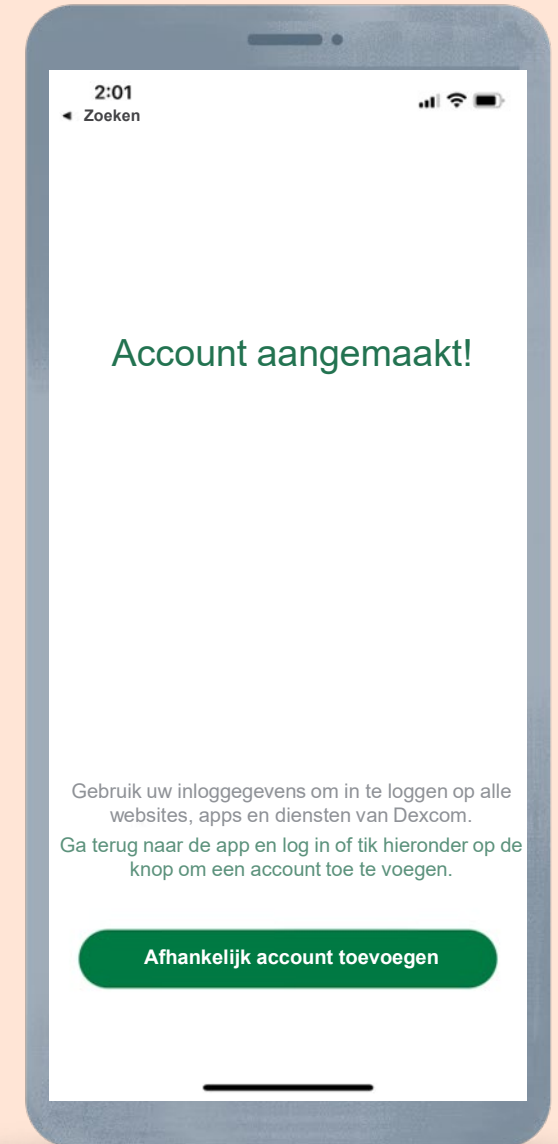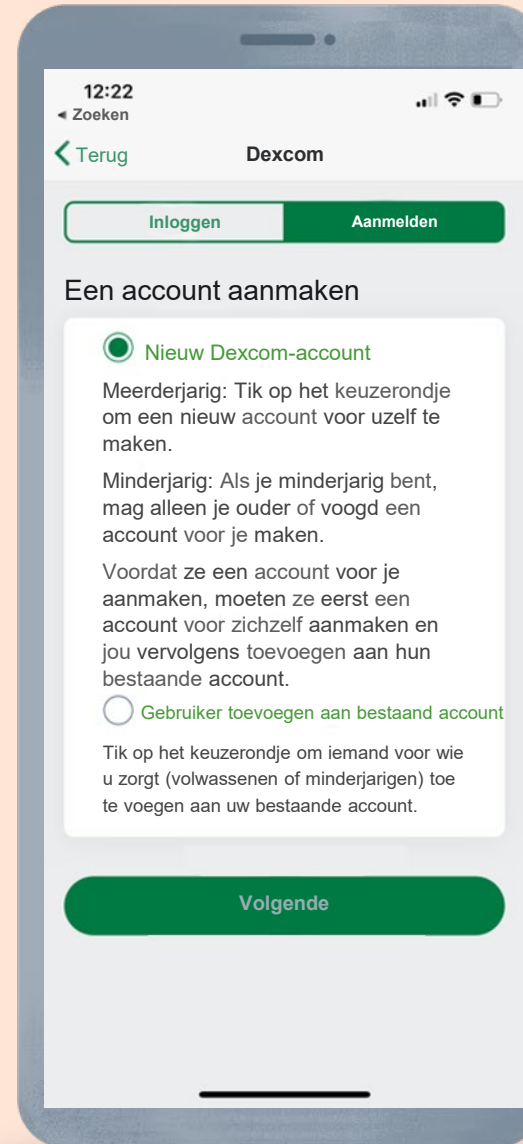

Navigeren door uw ontvanger

Op het scherm van de ontvanger ziet u welke knop u moet gebruiken.

Om sneller te scrollen houdt u de **scrolknop** ingedrukt.

Om naar het volgende scherm te gaan drukt u op de **selecteerknop**.


Zet uw ontvanger aan door de **selecteerknop** 3-5 seconden ingedrukt te houden.



Overzicht

De app of ontvanger begeleidt u stap voor stap bij het instellingsproces. Volg gewoon de stappen voor een geslaagde instelling. Het gedeelte Overzicht van de app bevat een minicursus over:


- Basisprincipes van G7
- Sensorwaarden (video- en tekstversies beschikbaar)
- Waarschuwingen (video- en tekstversies beschikbaar)
- Wanneer u uw bloedglucosemeter moet gebruiken (video- en tekstversies beschikbaar)
- Veiligheid

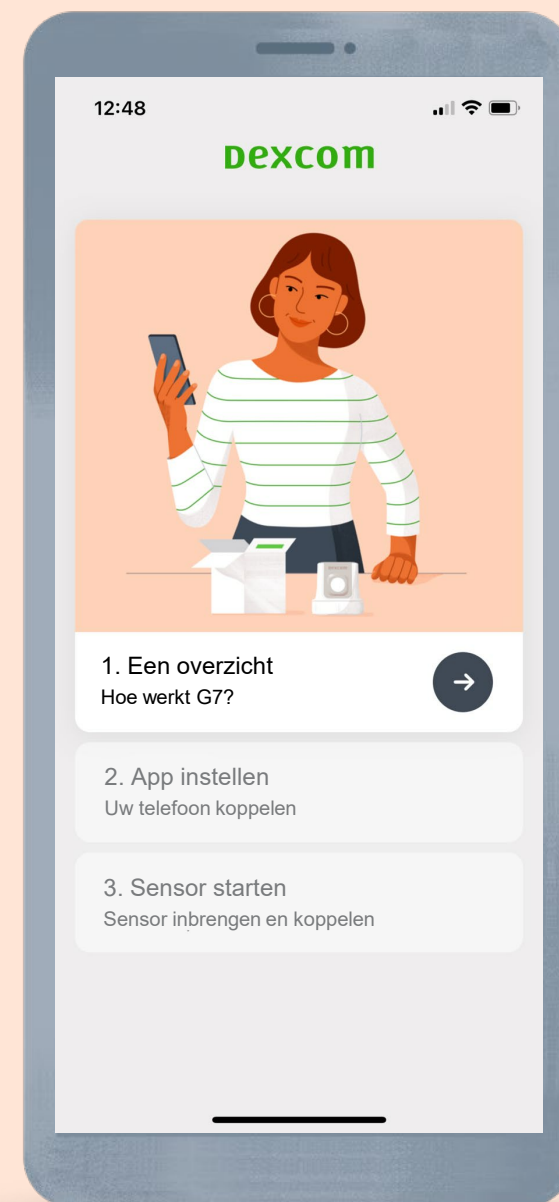

App instellen

App instellen, stap voor stap:


- Bluetooth inschakelen (moet zijn ingeschakeld voor de werking van het systeem)
- Andere vereiste telefooninstellingen verrichten (Android of iOS zijn verschillend)

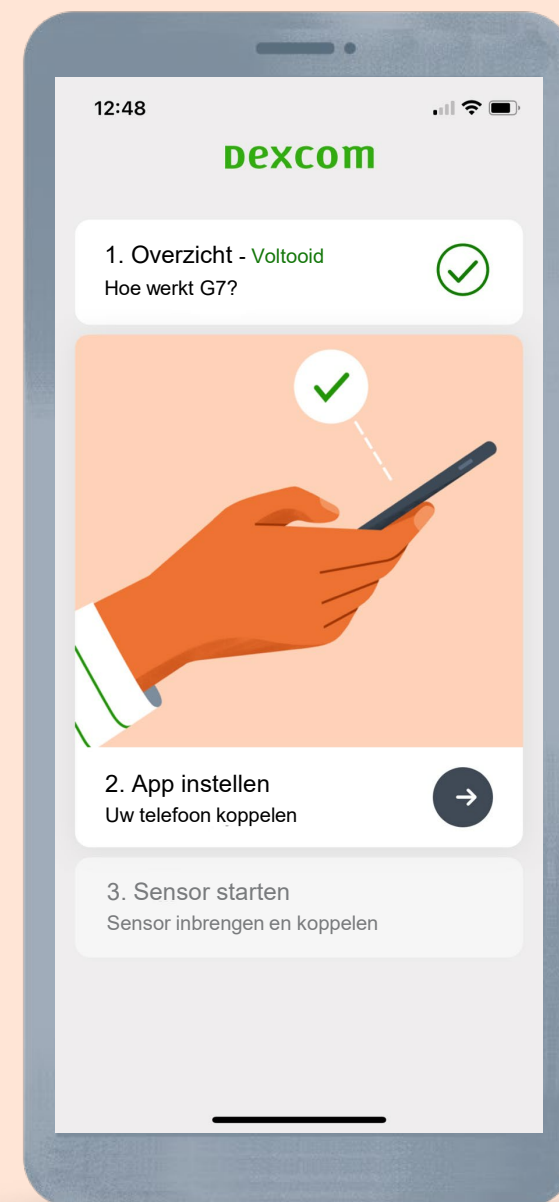

Sensor starten

Sensor starten, doorloop de volgende processen:

- Sensorlocatie kiezen
- De sensor inbrengen
- Koppelen

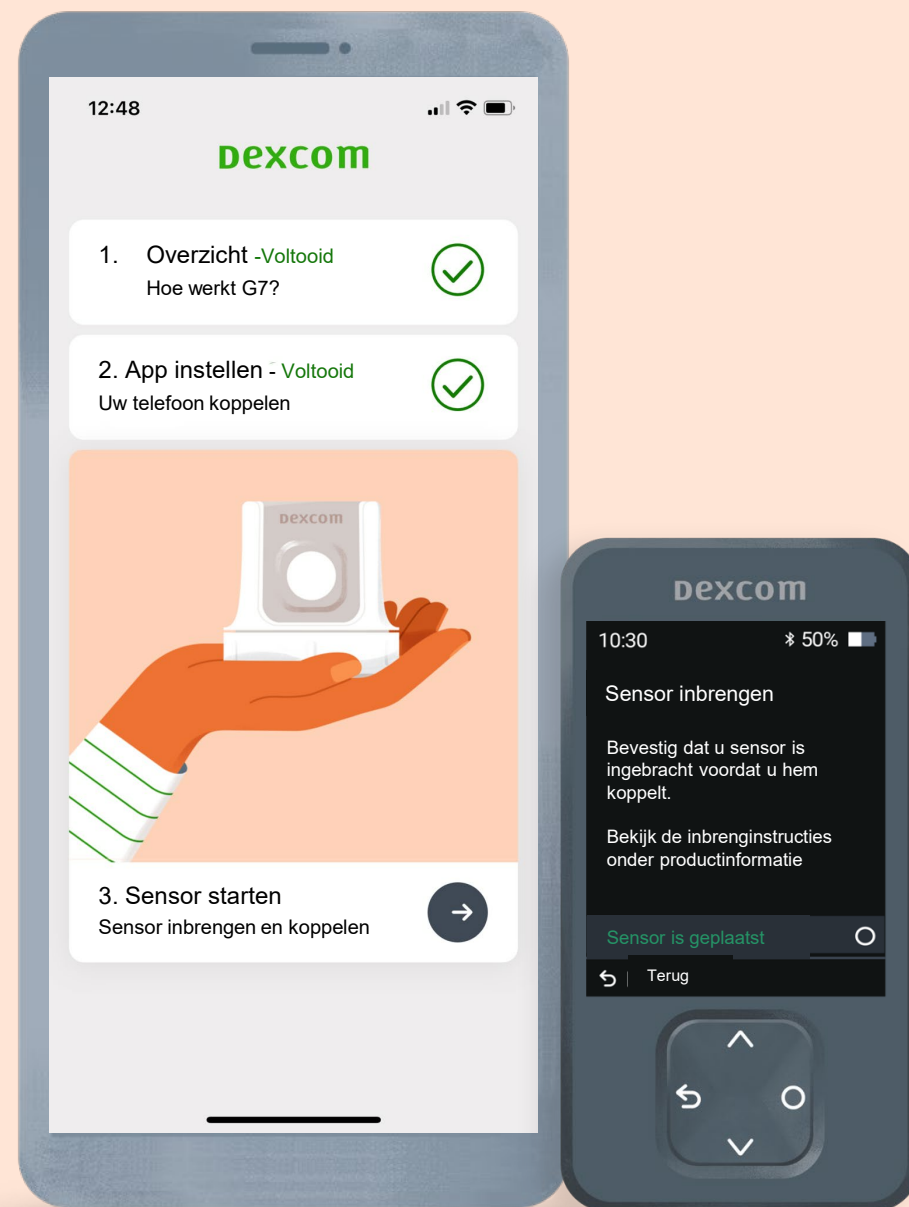

De sensor aanbrengen

Breng uw sensor aan zodra u hierom wordt gevraagd. De app geeft u aanwijzingen.

Vermijd de volgende plaatsen:

- Plaatsen waar de huid los is en zonder voldoende vet om spieren en botten te vermijden
- Plaatsen waartegen gemakkelijk tegen wordt gestoten of geduwd, of waarop u ligt tijdens het slapen
- Binnen 8 centimeter van de infusie- of injectieplaats
- Nabij uw tailleband of plaatsen met irritaties, littekens, tatoeages of veel lichaamshaar



De sensor aanbrengen



Was uw handen met water en zeep. Droog ze af.



Reinig de gekozen plaats met een alcoholdoekje. Wacht tot de huid droog is.



Schroef de dop eraf. Raak de binnenkant niet aan.



Druk de applicator stevig tegen de huid en druk vervolgens op de knop.



Verwijder de applicator.




Wrijf 3 keer stevig rondom over de pleister.



Druk voorzichtig gedurende 10 seconden op de sensor.

Extra pleister

De extra pleister zorgt ervoor dat de sensor op zijn plaats blijft. U vindt de extra pleister samen met de instructies in de doos van de sensor.

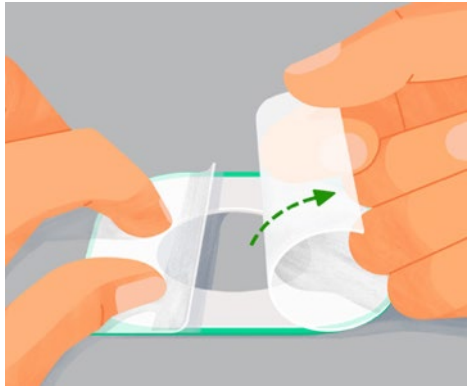

Verwijder voorzichtig één voor één beide doorzichtige afdekkingen. Raak het witte klevende gedeelte niet aan.



Gebruik het gekleurde lipje om de extra pleister rondom de sensor aan te brengen.



Wrijf over de extra pleister.



Gebruik het lipje om de gekleurde bescherming te verwijderen.




Wrijf over de extra pleister.

Dexcom G7 is waterdicht gedurende 24 uur tot 2,4 meter diep.

Koppelen

Nadat u de sensor heeft ingebracht, voert u de koppelingscode in en wacht u totdat uw sensor is gekoppeld.

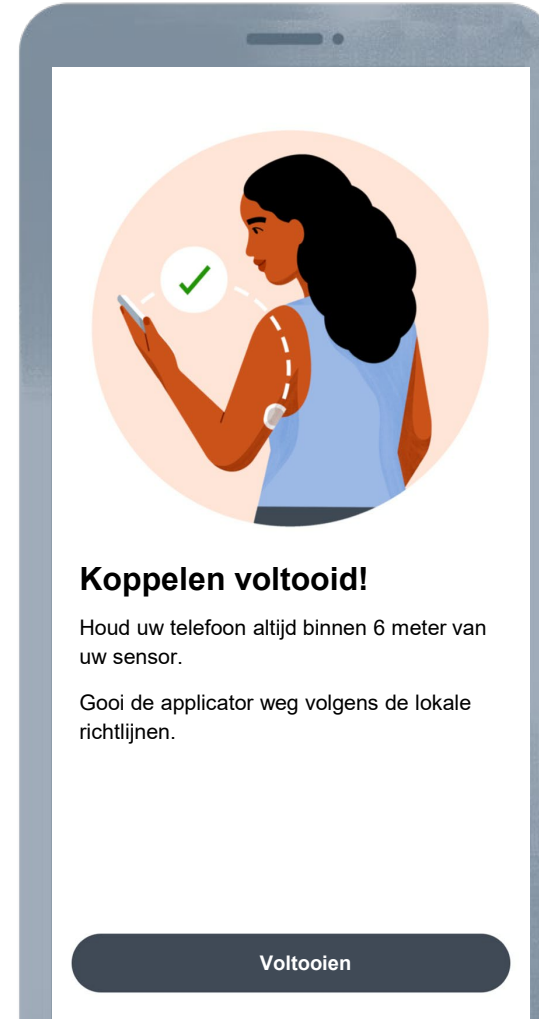


Opwarmen

Zodra de communicatie bevestigd is, wordt het opwarmen gestart.

Op de opwarmtijd van de sensor kunt u zien wanneer de weergave van waarden en waarschuwingen start. Het opwarmen begint al bij het inbrengen van de sensor, waardoor u mogelijk minder dan 30 minuten ziet.

Houd uw apparaat gedurende deze tijd binnen 10 meter.

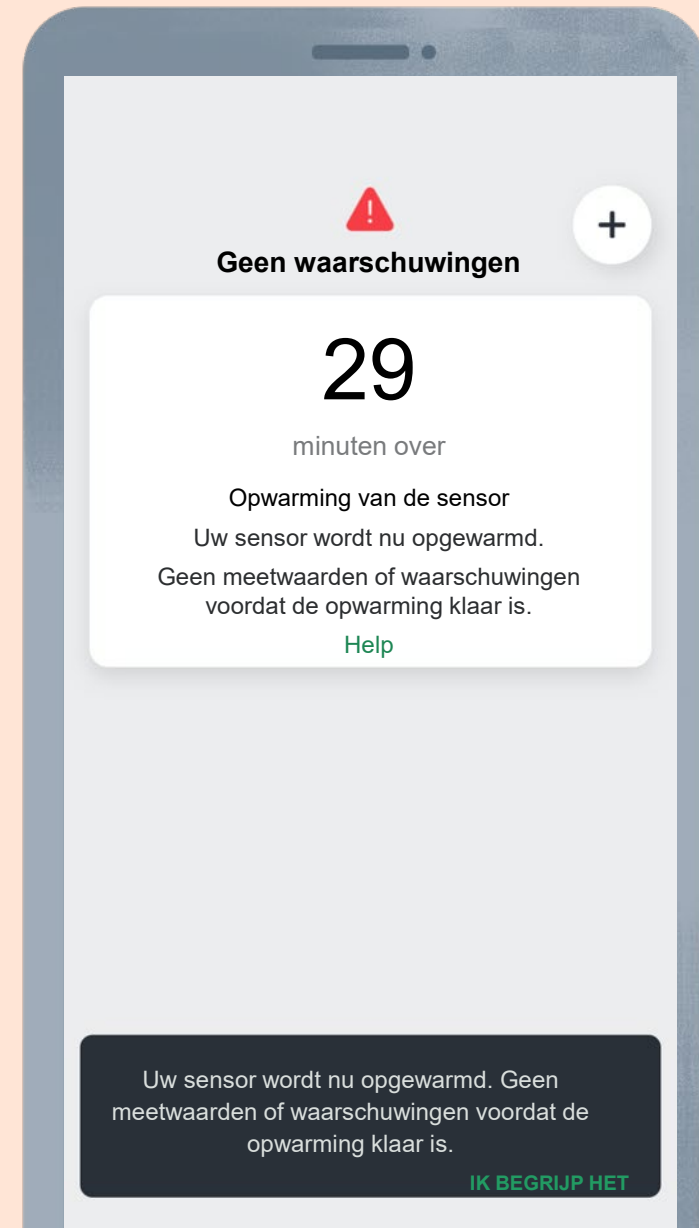


Begin van de trendgrafiek

Na het opwarmen verschijnt het begin van de trendgrafiek.

Uw apparaat moet zich binnen 10 meter bevinden om glucose-informatie te ontvangen.

Als u toch van uw apparaat wegloopt, vult de app als u opnieuw verbinding maakt met terugwerkende kracht 24 uur aan gegevens in zodra u opnieuw verbinding maakt.

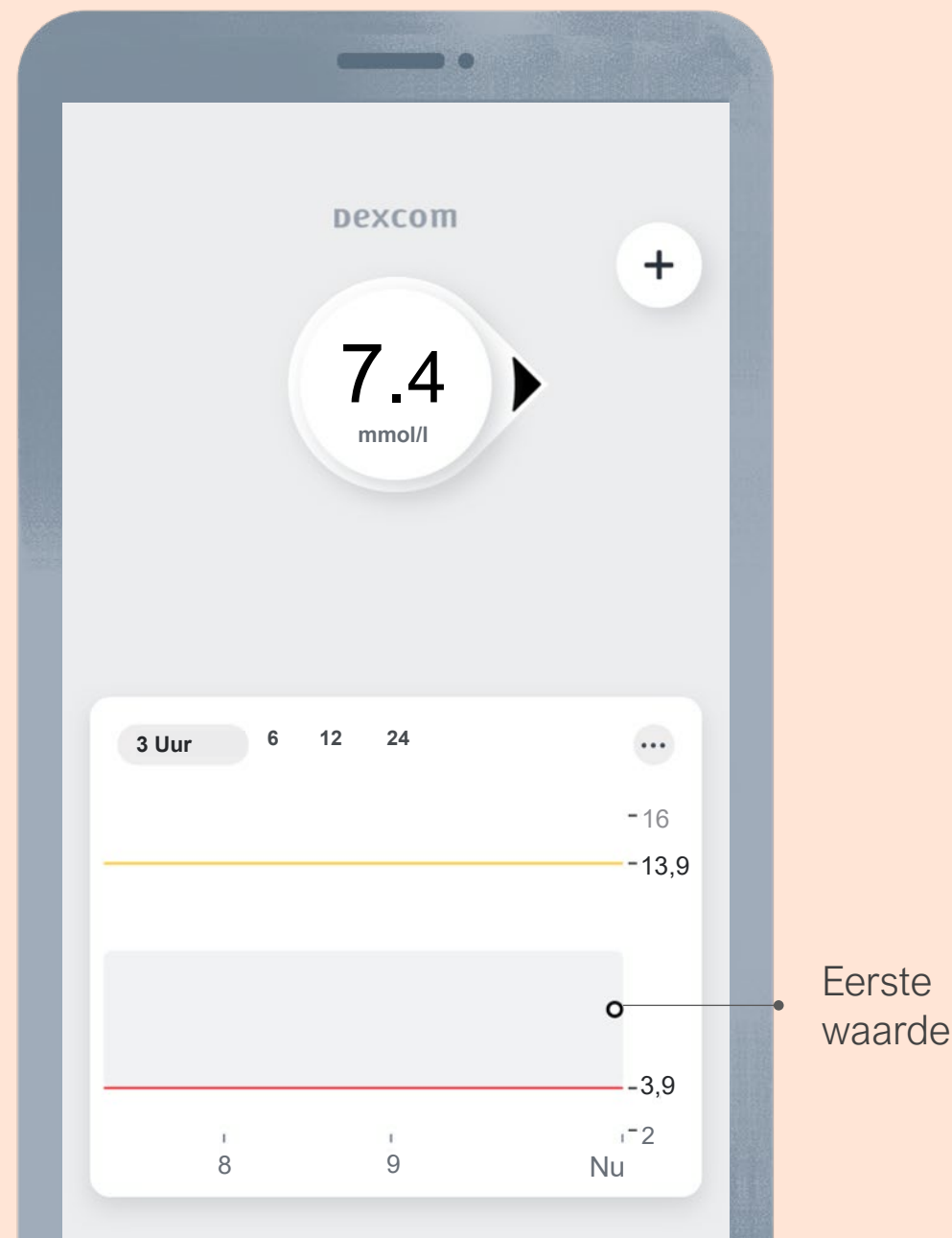


Het trendscherm van de app bekijken



Liggend

Klik hierop om een trendgrafiek van 3, 6, 12 of 24 uur te bekijken.

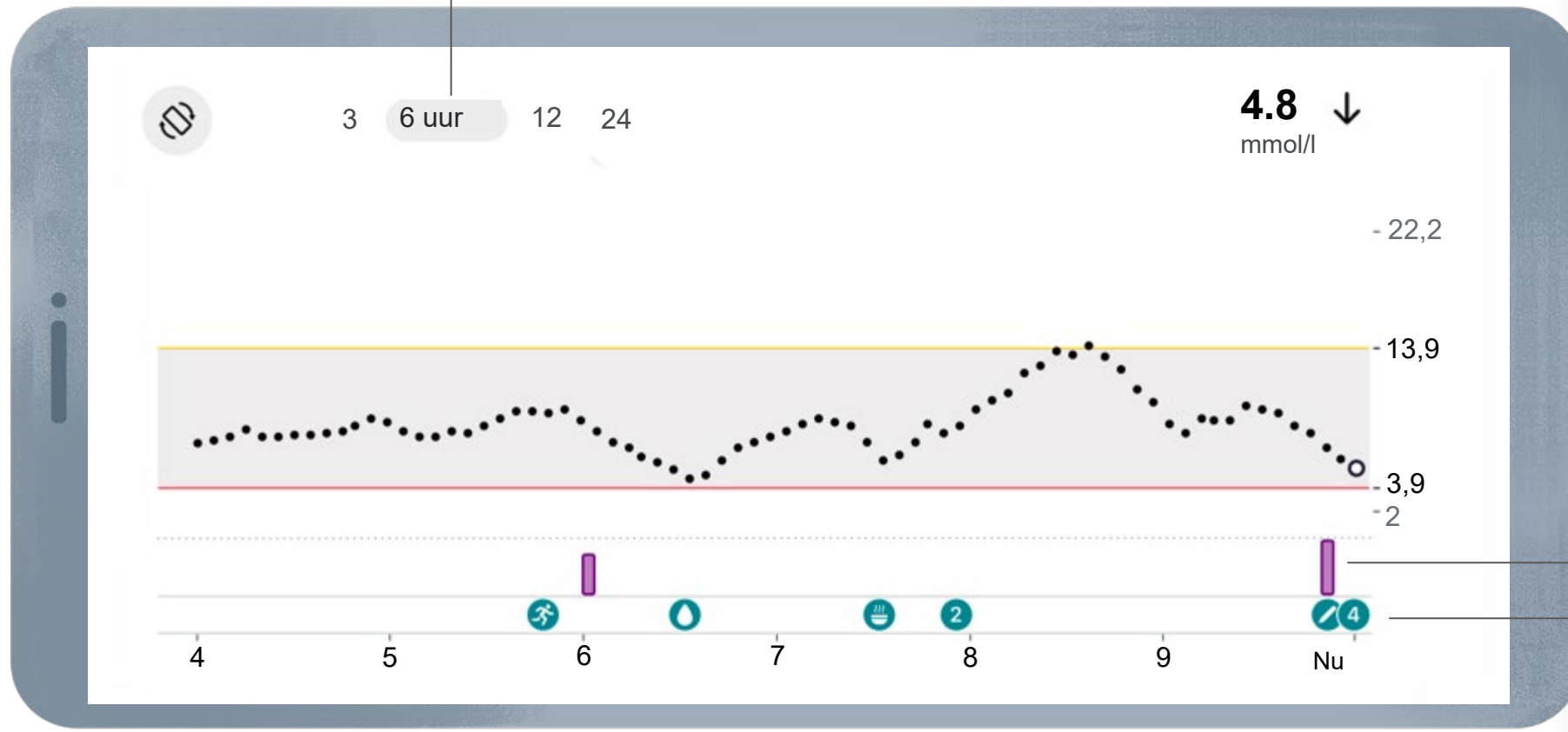

Insuline
Gebeurtenissen

Het trendscherm van de ontvanger bekijken




Trendpijlen

Trendpijlen laten zien of en hoe snel uw glucose stijgt of daalt.



Stabiel
Verandert minder
dan 0.8 mmol/l
in 15 minuten

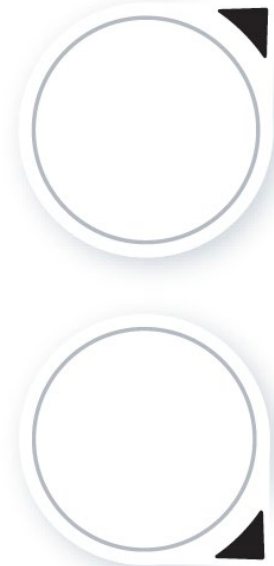

**Langzaam stijgend of
dalend**
Verandert
0.8-1.7 mmol/l
in 15 minuten



Stijgend of dalend
Verandert
1.7-2.5 mmol/l
in 15 minuten




Snel stijgend of dalend
Verandert meer
dan 2.5 mmol/l
in 15 minuten

Clarity-kaart

Scrol omlaag op het tabblad Glucose om de Clarity-glucose-overzichtsrapporten te bekijken.

De rapporten van 3, 7, 14, 30 en 90 dagen laten glucoseveranderingen in de loop van de tijd zien met behulp van de informatie die met de app is vastgelegd.


De Clarity-kaart wordt niet ingevuld totdat er minimaal 3 dagen aan gegevens beschikbaar zijn. Voor het GMI-gedeelte is 7 dagen aan waarden nodig.

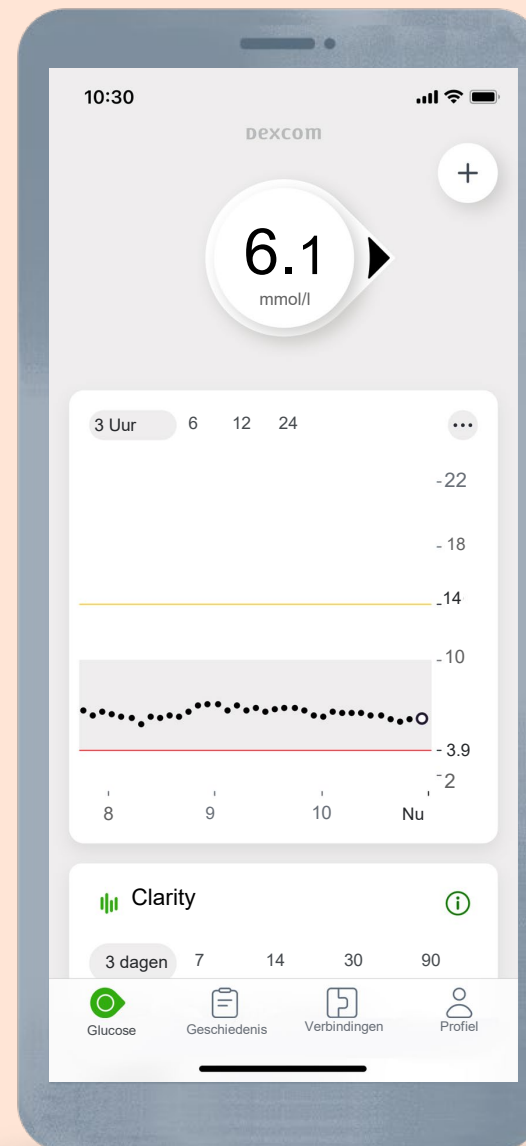

Geschiedenis

In Geschiedenis kunt u het volgende invoeren:

- Een vingerprik of kalibratie
- Nuchtere glucose
- Insuline (snel- of langwerkende dosis)
- Maaltijden
- Activiteit
- Notities
- Eerder ingevoerde gebeurtenissen bewerken

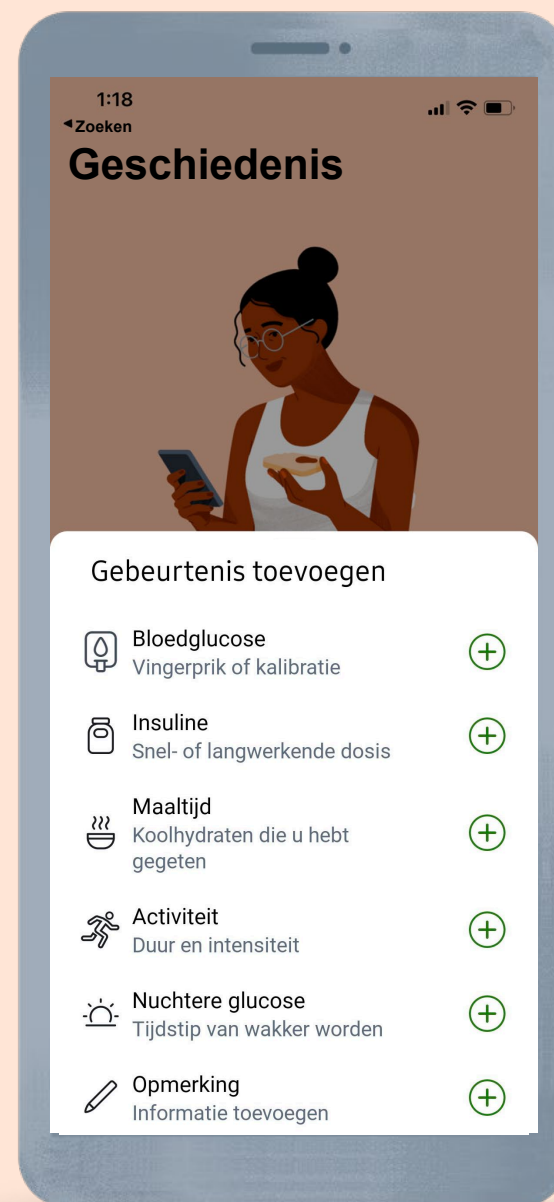

Verbindingen

In Verbindingen kunt u:

- Informatie over de sensor vinden
 - Sensor vervangen
 - Sensorsessie beëindigen
 - Koppelingscode bekijken
- Gegevens delen met zorgverlener*
- Dexcom Share instellen om glucose-informatie te delen met vrienden en familie
- Glucosegegevens verzenden naar Apple Health (alleen voor iOS)
- Uw smartwatch koppelen (alleen voor iOS)

*Gebruiker moet eerst Dexcom G7 data synchroniseren met Dexcom Clarity app en gegevens delen met zorgverlener toestaan. Internetverbinding vereist om gegevens via een compatibele smartphone te delen met Dexcom Clarity: dexcom.com/compatibility.



Menustructuur van de ontvanger




Urgent lage glucose

De waarschuwing wordt geactiveerd zodra de sensor een waarde meet die op of onder 3.1 mmol/l ligt.

Kan niet worden gewijzigd of uitgeschakeld (tenzij de functie Alles dempen wordt gebruikt). Nadat u de eerste waarschuwing heeft bevestigd, wordt deze herhaald als de sensorwaarde gedurende 30 minuten urgent laag blijft.

Het geluid en de snooze-functie kunnen worden aangepast in **Profiel > Waarschuwingen > Urgent lage glucose**.

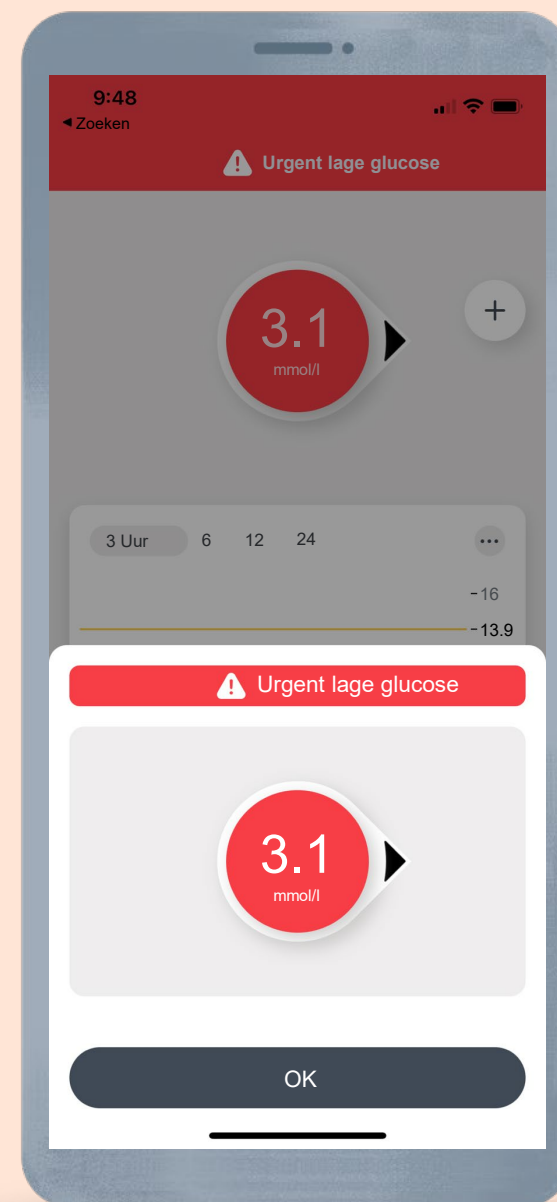


Naderend urgente lage glucose

De waarschuwing wordt geactiveerd zodra binnen 20 minuten een waarde optreedt die op of onder 3.1 mmol/l ligt.

Kan worden uitgezet of aangepast (geluid/trillen, snoozen) in

Profiel > Waarschuwingen > Naderend urgente lage glucose.

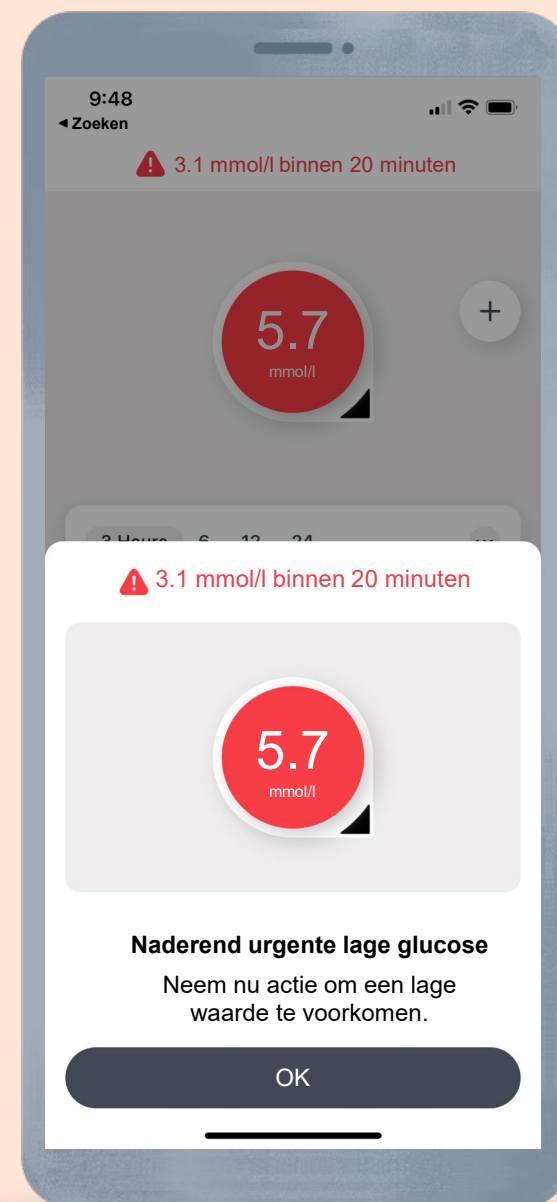

Waarschuwing lage glucose


Geeft een waarschuwing zodra de sensor een waarde meet die op of onder de ingestelde drempel ligt.

Standaard: 3.9 mmol/l

Bereik: 3.3-8.3 mmol/l

Kan worden uitgezet of aangepast (drempel, geluid/trillen, snoozen) in

Profiel > Waarschuwingen > Waarschuwing lage glucose.

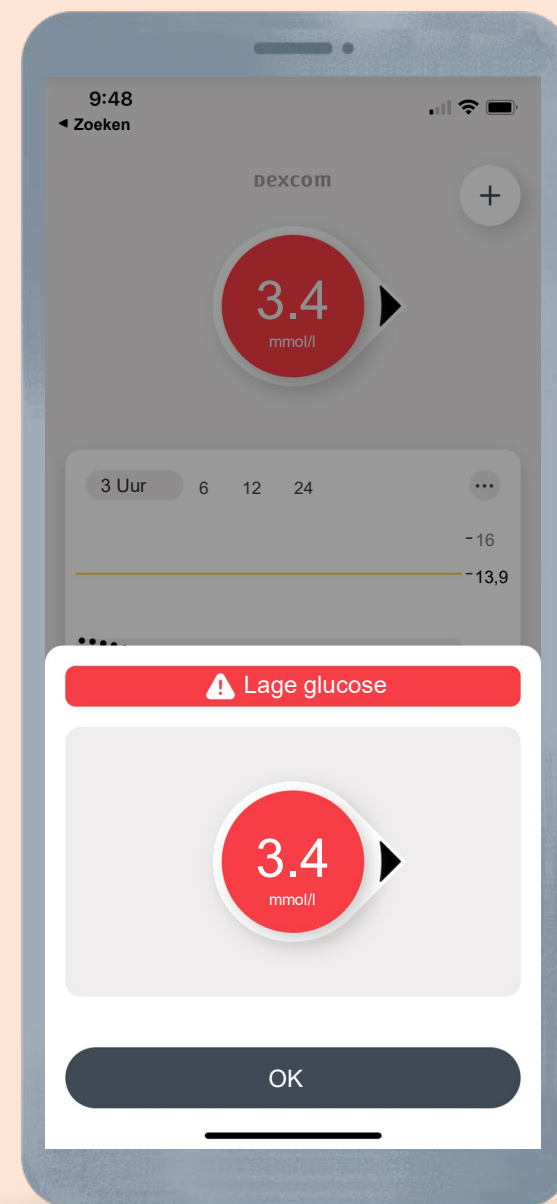

Waarschuwing hoge glucose


Geeft een waarschuwing zodra de sensor een waarde meet die op of boven de ingestelde drempel ligt.

Standaard: 14,0 mmol/l

Bereik: 5,5-22,2 mmol/l

Kan worden uitgezet of aangepast (drempel, geluid/trillen, vertraging 1^e waarschuwing, snoozen) in **Profiel > Waarschuwingen > Waarschuwing hoge glucose**.

Met de vertraging voor de 1^e waarschuwing kunt u uw eerste waarschuwing voor hoge glucose uitstellen totdat uw sensorwaarde een tijdje hoog is geweest.

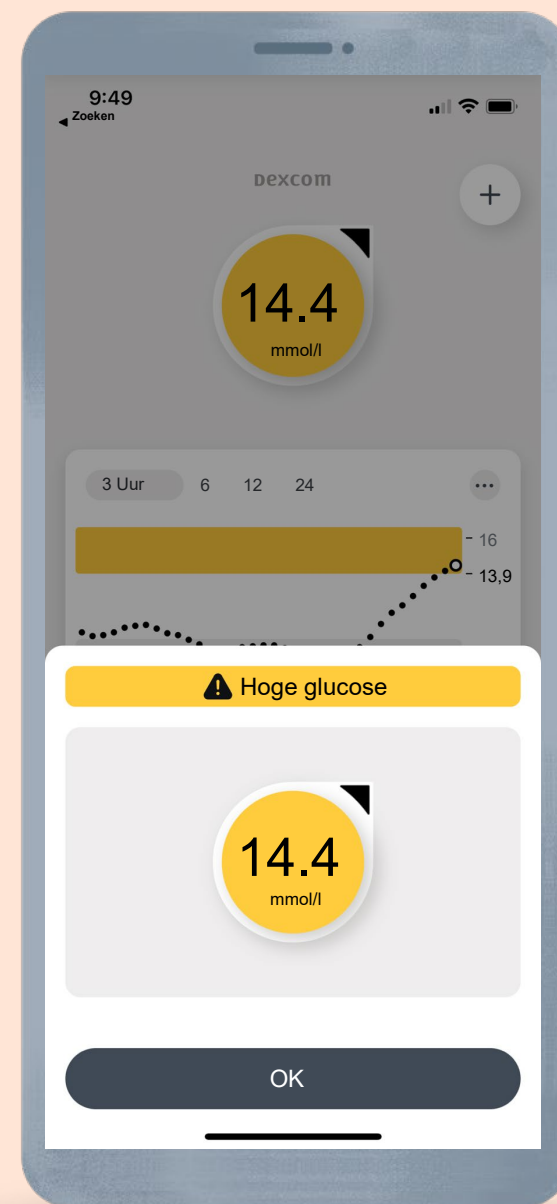


Eerste waarschuwing hoog uitstellen

Individueel instelbare alarmen die waarschuwen als het echt van belang is.



1. Waarschuwing hoog uitstellen, stelt u in staat het eerste alarm zo lang uit te stellen tot de sensorwaarde de ingestelde drempelwaarde voor een bepaalde periode (15min tot 4 uur) bereikt of overschreden heeft.

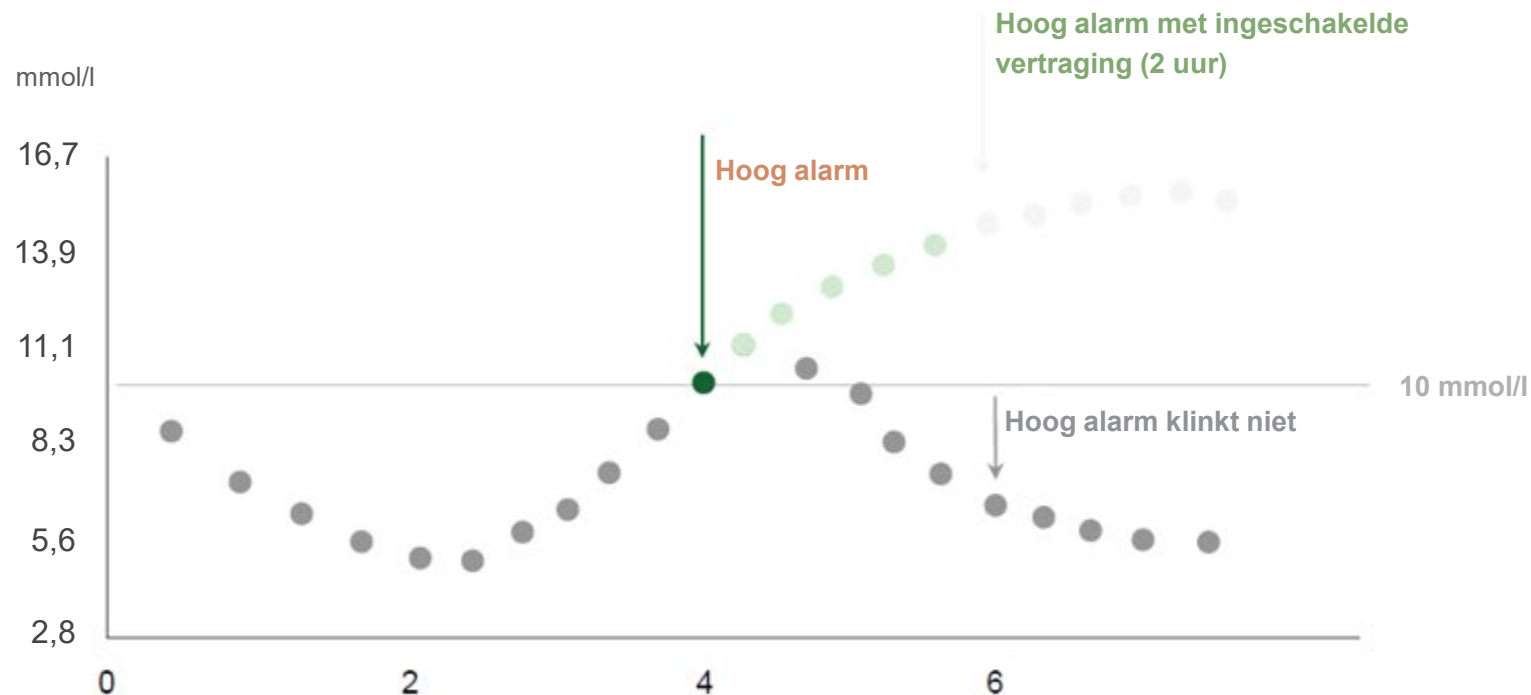


Stille modi

Pas waarschuwingen snel aan zodat ze discreter zijn met de stille modi. Kijk onder **Profiel** > **Waarschuwingen** > **Stille modi**.

Trillen: Stel alle waarschuwingen in op trillen gedurende 6 uur of voor onbepaalde tijd.

Alles dempen*: Alle waarschuwingen, waaronder Urgent lage glucose en Sensorstoring, worden zonder geluid of trilling geactiveerd. U kunt alle waarschuwingen gedurende maximaal 6 uur onderdrukken.

*Stille modus (Alles dempen): Wanneer deze instelling is ingeschakeld, zijn al uw G7-waarschuwingen stil. Geluid of trillen is voor geen enkele waarschuwing ingeschakeld. U krijgt nog wel visuele waarschuwingen op uw weergaveapparaat. (Uitzonderingen: waarschuwingen hebben nog wel geluid als de app is gestopt.) Kijk regelmatig op uw weergaveapparaat om te voorkomen dat u een lage/hoge glucosewaarde mist.

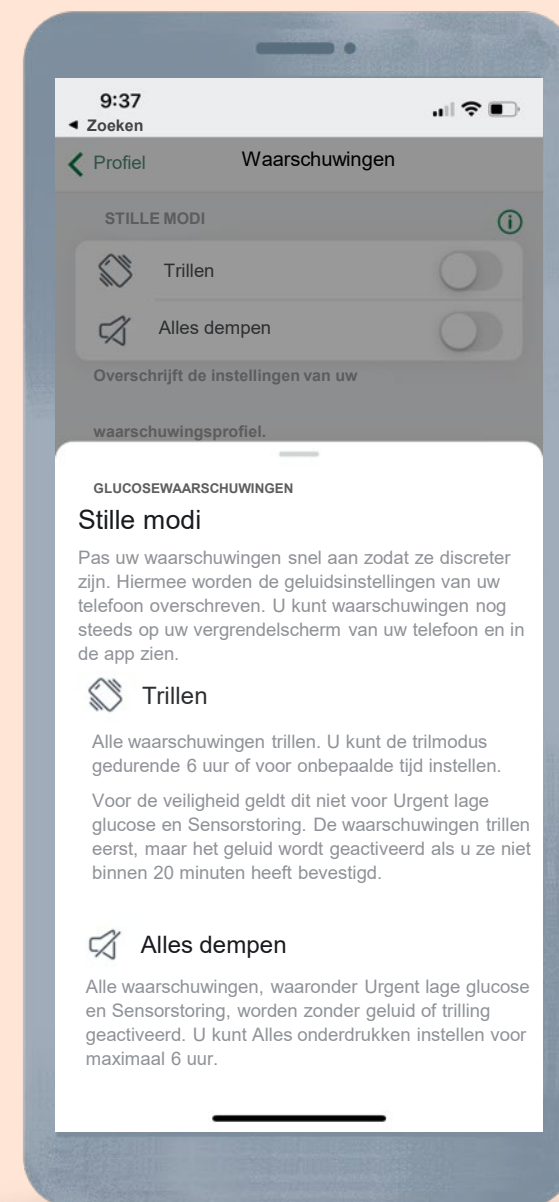

Tweede waarschuwingsprofiel

Maak een tweede waarschuwingsprofiel met aangepaste waarschuwingen.


Een voorbeeld: een profiel voor 's nachts of voor op het werk. Schakel tussen profielen of stel deze wisseling in.



Sensorsessie beëindigen


Iedere sensorsessie duurt maximaal 10 dagen plus een 12 uur durende uitlooperperiode. De uitlooperperiode geeft u meer tijd om de sensor te vervangen wanneer u dat uitkomt.

Tijdens de uitlooperperiode blijft de sensor hetzelfde werken als tijdens de sensorsessie. U krijgt waarschuwingen om u te laten weten dat de sensorsessie of de uitlooperperiode bijna voorbij is. U kunt ervoor kiezen om de sensor te blijven dragen tot de uitlooperperiode begint of om de sessie eerder te beëindigen.

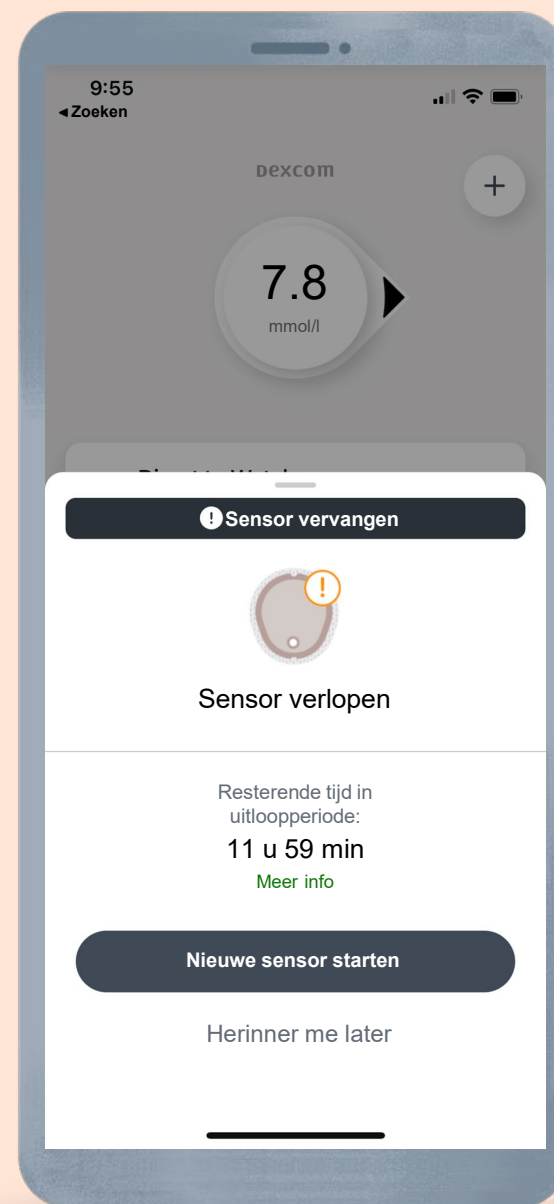

Sensor automatisch stoppen

De sensor stopt automatisch wanneer de uitlooperperiode eindigt.

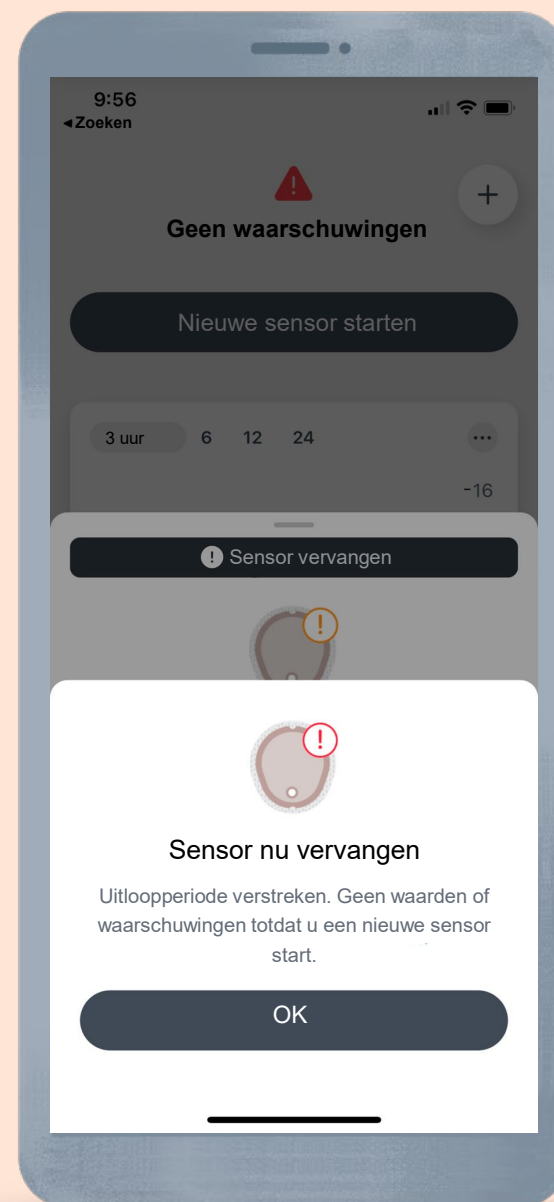

Sensor handmatig stoppen


U kunt ervoor kiezen om de sensorsessie handmatig eerder te beëindigen. Om de sensor handmatig te stoppen voordat de uitlooperperiode eindigt of op een ander moment tijdens de sensorsessie te stoppen, gaat u naar **Verbindingen > Sensor**.

Tik op:

SENSOR VERVANGEN: Om direct een nieuwe sensorsessie te starten


of

SENSORSSESSIE BEËINDIGEN: Om deze sensor te stoppen zonder een nieuwe te starten

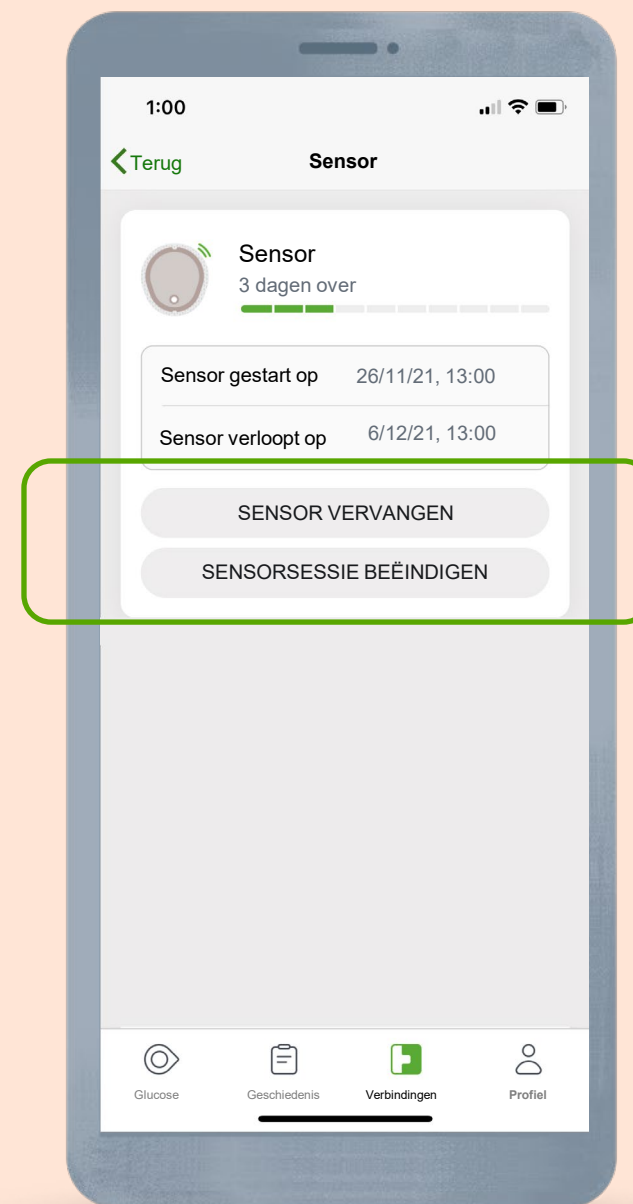

Sensorsessie beëindigen: Handmatig

U moet de sensorsessie of de uitlooperperiode stoppen voordat u een nieuwe sensor start. U kunt dit handmatig doen, voordat de uitlooperperiode eindigt, door naar **Menu > Sensor vervangen** te gaan.

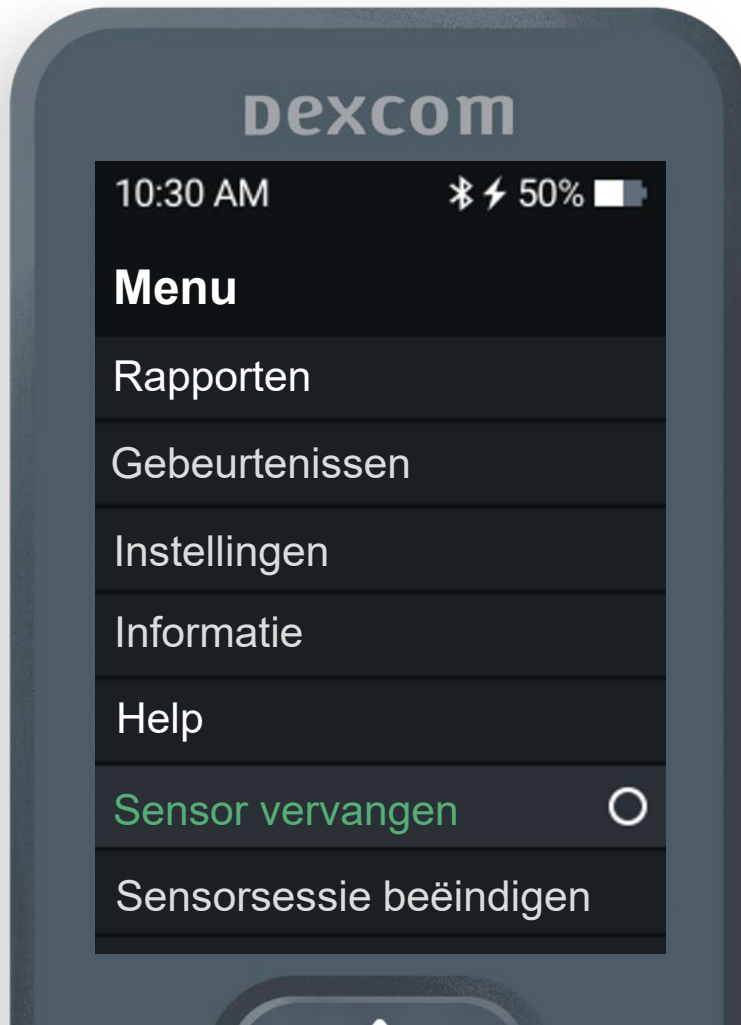


De sensor verwijderen

Trek aan het einde van de sensorsessie de pleister van uw huid.

Zo kunt u dat makkelijker maken en huidirritatie voorkomen:

- Maak een randje los en doordrenk de pleister met een lichaamsolie, zoals babyolie of een kleefmiddelverwijderaar voor de huid
- Wrijf met een lijmdoekje over de huid die tevoorschijn komt terwijl u de pleister lostrekt.

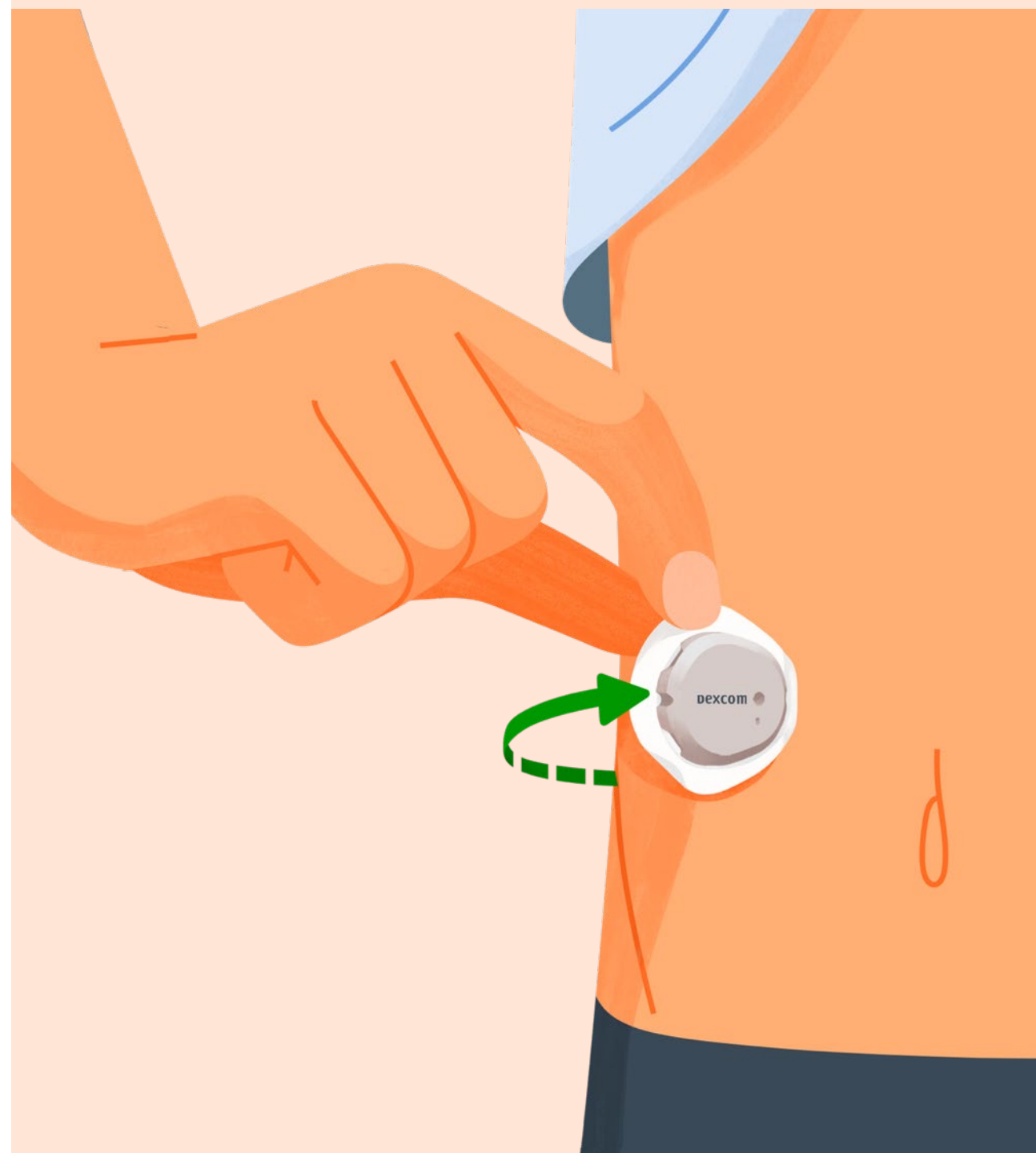

Dexcom Share

Dexcom Share is een functie van de Dexcom G7-app waarmee iemand (de deler) glucose-informatie op afstand kan verzenden naar anderen (volgers).

De Dexcom Follow-app* is een afzonderlijke app en maakt deel uit van Dexcom Share.

Voeg maximaal 10 volgers toe.

*Internetverbinding vereist voor het delen van gegevens. Voor het delen van gegevens is het gebruik van de Follow-app vereist. Volgers dienen waarden altijd te bevestigen in de Dexcom G7-app of op de ontvanger voordat er behandelbeslissingen worden genomen.




Dexcom Share instellen

Tik op **Verbindingen** > **Share** om in te stellen, de app begeleidt u bij het uitnodigen van een volger.

Er wordt een e-mail verzonden naar de volger. De volger downloadt de Dexcom Follow-app* en accepteert de uitnodiging.

De volger kan de eigen meldingen bewerken. Diegene kan meldingen in de app van de deler niet bewerken.

*Internetverbinding vereist voor het delen van gegevens. Voor het delen van gegevens is het gebruik van de Follow-app vereist. Volgers dienen waarden altijd te bevestigen in de Dexcom G7-app of op de ontvanger voordat er behandelbeslissingen worden genomen.

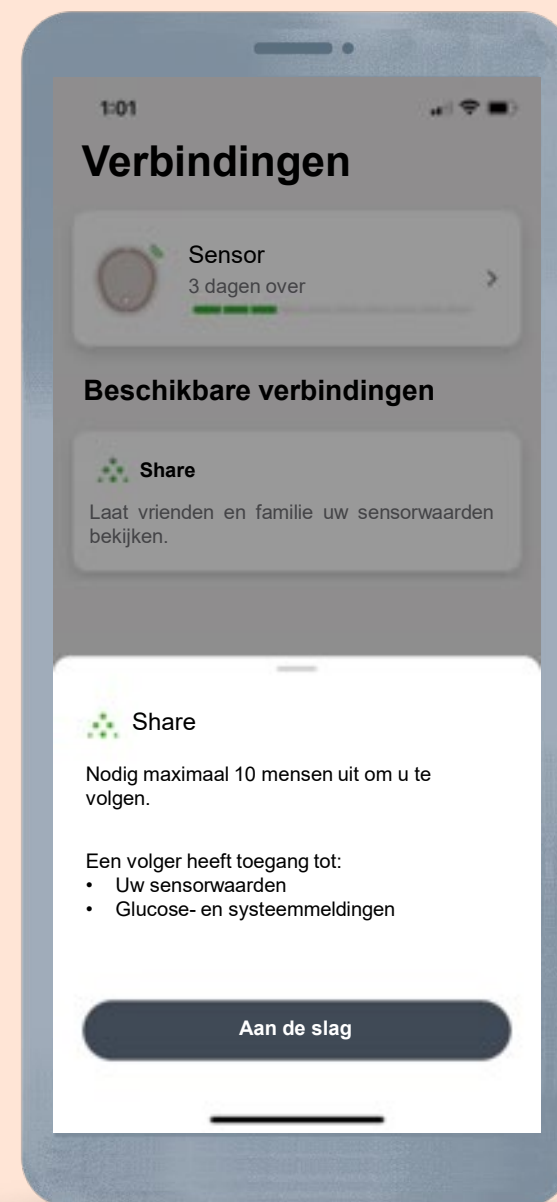

Direct to Watch

Met Direct to Watch kunnen glucosegegevens op een compatibel horloge* getoond worden - zonder telefoon!

Er zijn twee manieren waarop je een smartwatch kan instellen:

- **Direct to Watch-modus (alleen Apple Watch):**
De smartwatch krijgt informatie van de sensor, net als de telefoon. Je kunt je telefoon achterlaten indien gewenst.
- **Standaard Smartwatch-modus:**
De smartwatch kopieert informatie van de telefoon, niet van de sensor. De gebruiker moet zijn telefoon in de buurt houden.

*Weergaveapparaten worden apart verkocht. Ga voor een lijst met compatibele smartapparaten naar www.dexcom.com/compatibility.



Direct to Watch Instellen


Ga in de Dexcom G7-app naar **Verbindingen** > **Direct to Watch**. Volg daarna de instructies op het scherm.

Je smartwatch zal de app laden. Als dit niet gebeurt, moet open je de watch app op je telefoon. Ga in het tabblad **Mijn horloge** naar de lijst beschikbare apps en Installeer.

Volg de instructies op het scherm om Direct to Watch in te stellen.

Let op! Je moet de juiste versie van de Apple Watch en watchOS* hebben.

*Weergaveapparaten worden apart verkocht. Ga voor een lijst met compatibele smartapparaten naar www.dexcom.com/compatibility.

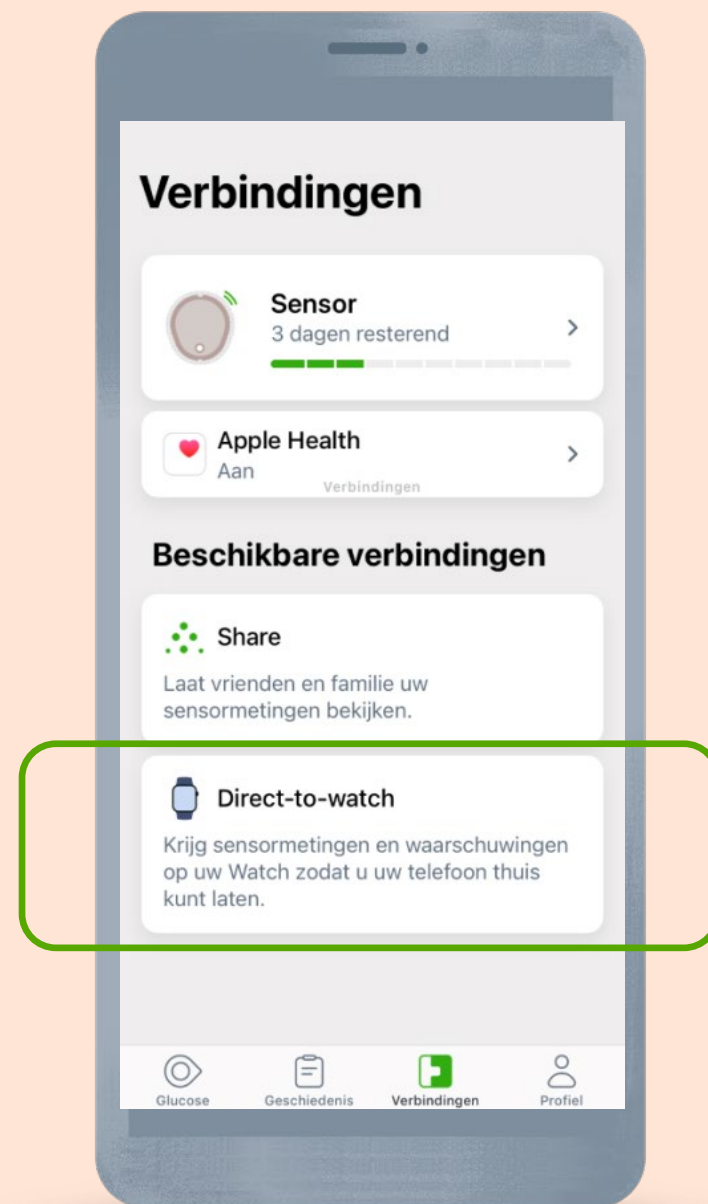

Sensor en smartwatch koppelen

Om je G7 sensor met je smartwatch te koppelen ga naar **Verbinden > Direct to Watch**

Let op: Een nieuwe sensor start je altijd eerst in de G7 app op je telefoon!



Horloge zoekt naar sensor

- Sensor is actief (en al met telefoon gekoppeld)
- Het horloge probeert met de sensor te koppelen



Koppelerzoek

- Je wordt verzocht om de koppeling te bevestigen



1^{ste} koppeling bevestigen


- Bevestiging eerste Direct to Watch koppeling

Dexcom Clarity-app

Als u de Dexcom Clarity-app downloadt, kunt u bijhouden hoeveel vooruitgang u heeft geboekt, wekelijkse meldingen ontvangen over uw statistieken, en gegevens delen met uw zorgverlener*.

Wanneer u de Dexcom G7-app gebruikt, worden uw glucosegegevens automatisch doorgestuurd naar uw Dexcom Clarity-account.

*Gebruiker moet eerst Dexcom G7 data synchroniseren met Dexcom Clarity app en gegevens delen met zorgverlener toestaan. Internetverbinding vereist om gegevens via een compatibele smartphone te delen met Dexcom Clarity: dexcom.com/compatibility.

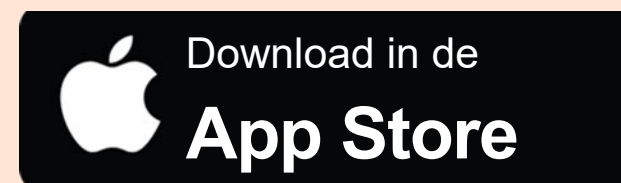


Dexcom Clarity

Log in op clarity.dexcom.eu.

Gebruik uw bestaande Dexcom-gebruikersnaam en -wachtwoord.

Gratis te gebruiken.

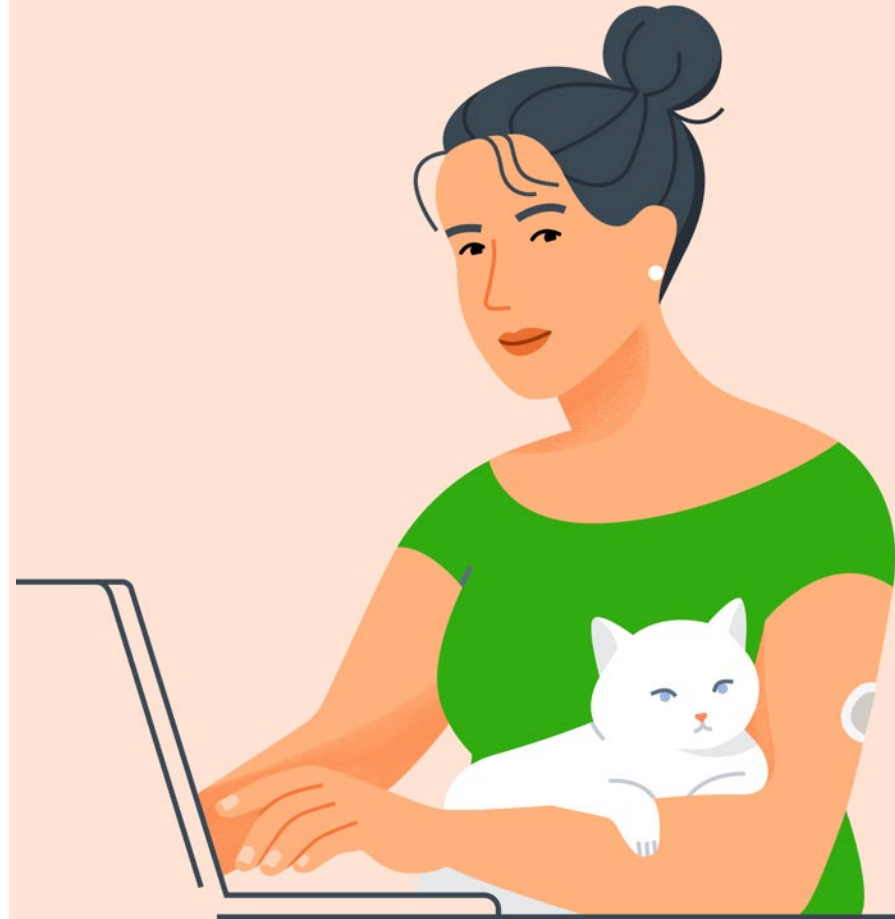

Koppeling ziekenhuis

Gegevens delen met behulp van de Dexcom G7-app


- Tik op Verbinding > Clarity Clinic
- Voer de koppelcode van uw zorgverlener in

Gegevens delen met behulp van de Dexcom Clarity-app

- Tik op Profiel > Delen autoriseren
- Voer de koppelcode van uw zorgverlener in




Gegevens delen via de Dexcom Clarity-website

- Log online in bij Dexcom CLARITY op clarity.dexcom.eu/share
- Ga naar Instellingen > Gegevens delen met zorgverlener
- Voer de koppelcode van uw zorgverlener in

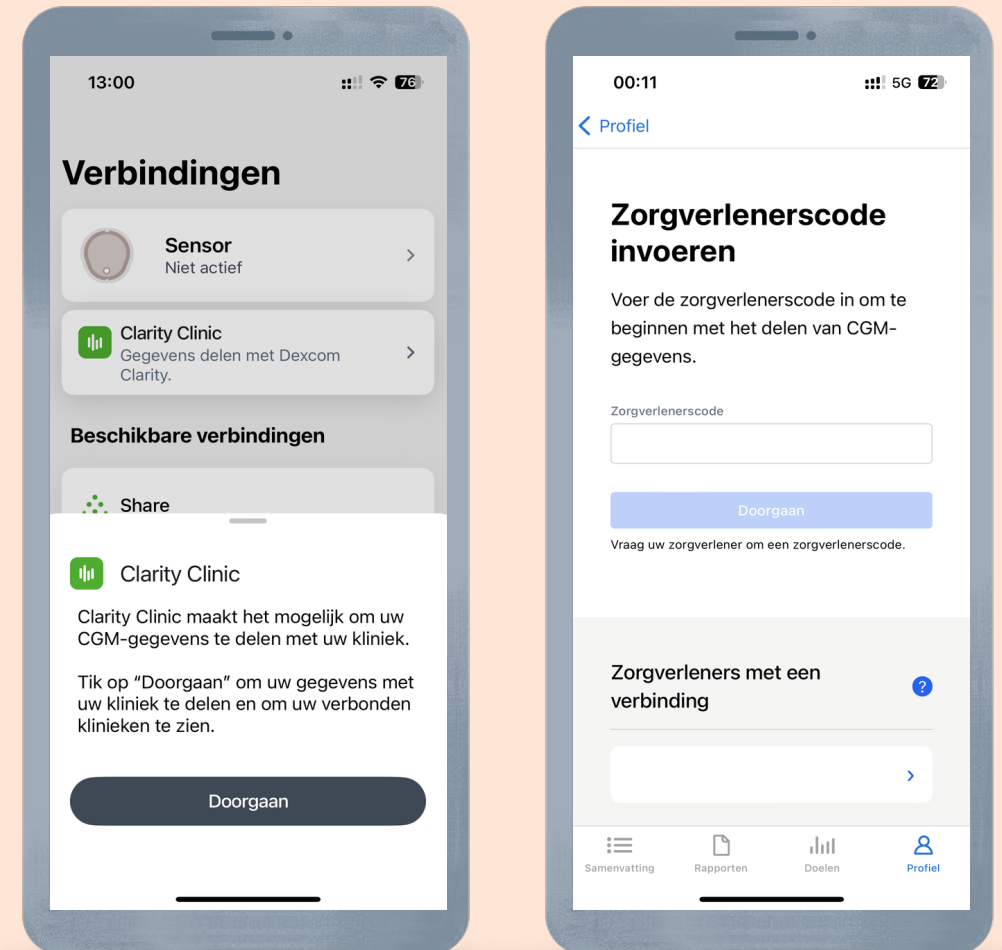

Koppeling met **glooko**[®]



- Open uw **Glooko**[®] app op uw smartphone en log in met uw **Glooko**[®] account of maak een nieuw account aan
- **Tik op Apparaat synchr.** op het startscherm, en ga dan naar **Nieuw apparaat toevoegen**
- Tik op **Continue glucosemonitors** om een vinkje (✓) in de box ernaast te plaatsen. Ga dan op **Doorgaan**
- Tik nu op **Dexcom** en set een vinkje in de box (✓)
- Om de synchronisatie te voltooien, **log in** met uw **Dexcom account** of maak een nieuw Dexcom account aan

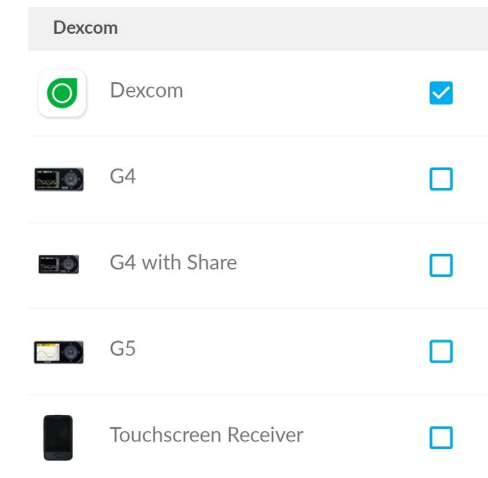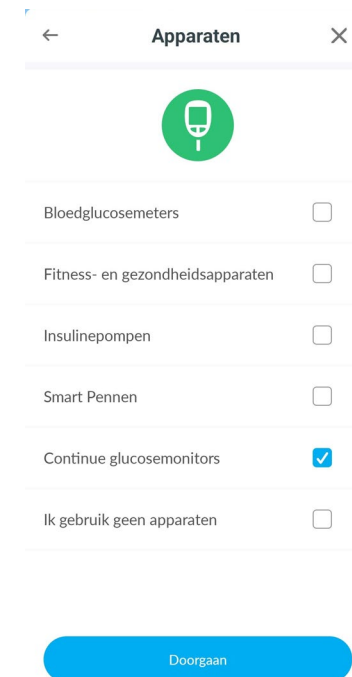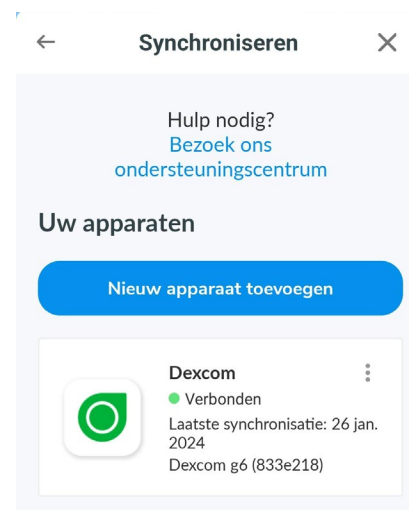

Behandelbeslissingen nemen

Geen getal of pijl? Gebruik dan altijd uw bloedglucosemeter.


Symptomen die niet overeenstemmen met meetwaarden? Gebruik dan uw bloedglucosemeter.

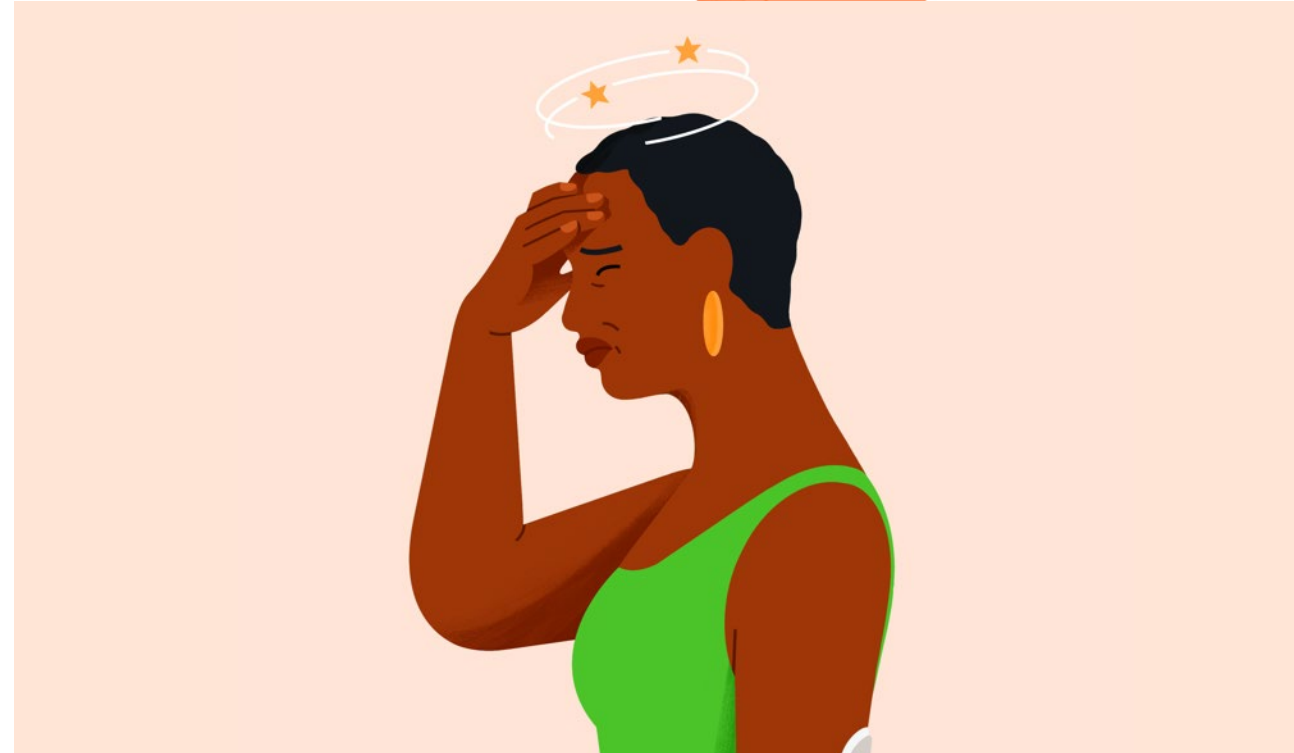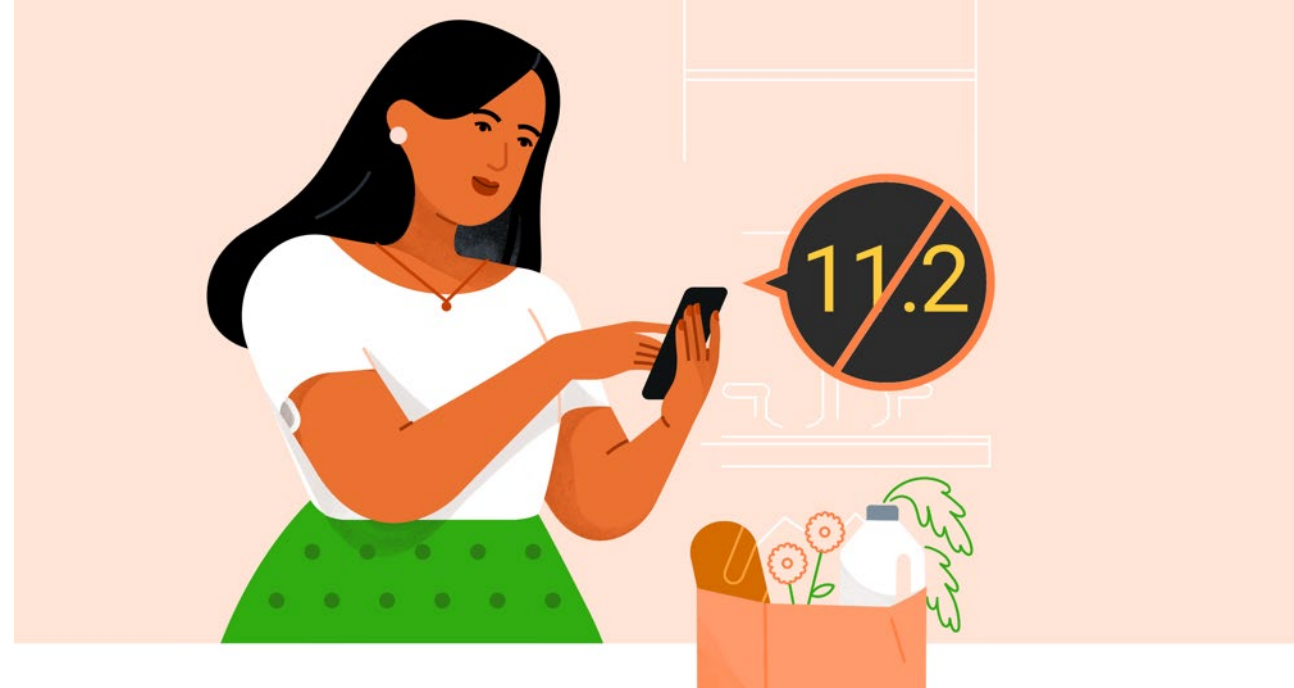

MRI/CT/diathermie

Draag geen G7-onderdelen tijdens een scan met magnetische resonantie (MRI) of behandelingen met hoogfrequente elektrische warmte (diathermie).

Het is echter veilig om een CT-scan te laten uitvoeren als het mogelijk is om de sensor buiten het gescande gebied te houden en af te dekken met een loodschort tijdens de scan.

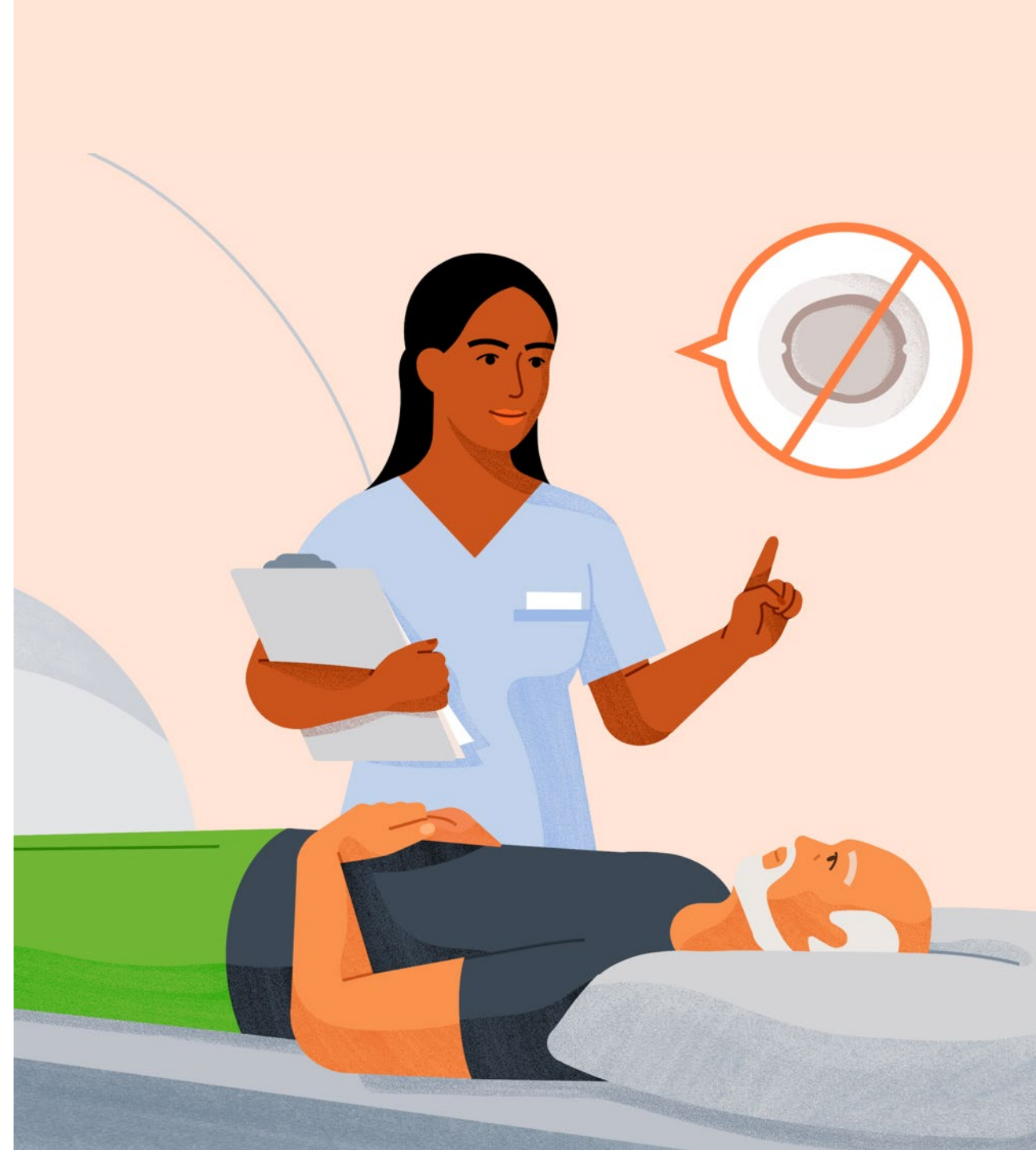

Beveiliging en reizen


Wanneer u door een metaaldetector of AIT-lichaamsscanner loopt, kunt u de sensor gewoon dragen.

U kunt ook vragen om een tastcontrole of volledige fouillering. Vraag naar een visuele inspectie voor de bagage waar de G7 onderdelen inzitten.



Zonnebrandcrème en insectenwerend middel

Gebruik geen insectenwerend middel, zonnebrandcrème, parfum of lotion op de inbrengplaats of de sensor voordat u uw sensor inbrengt en tijdens uw sensorsessie. Dit kan ertoe leiden dat de sensor niet goed blijft zitten of de G7 beschadigd raakt.

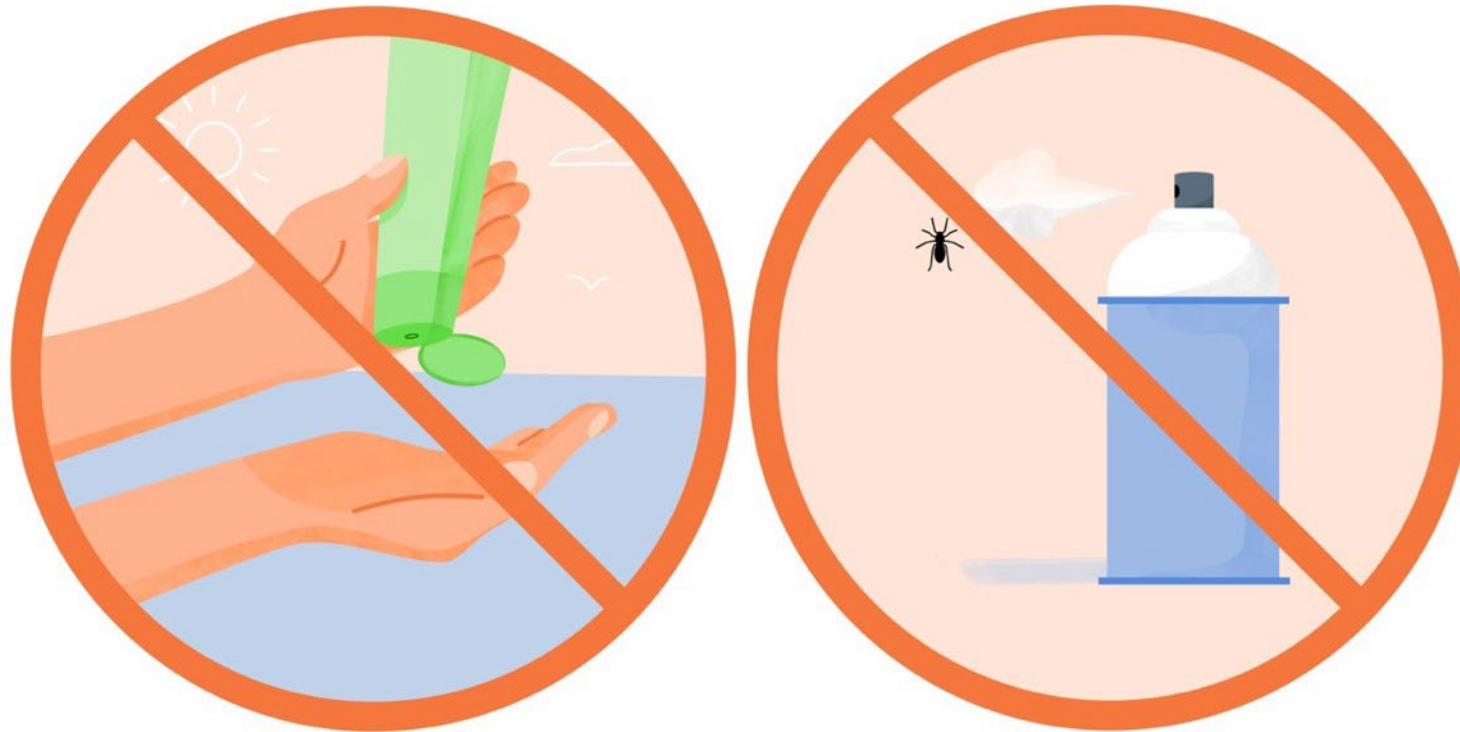

Heeft u nog vragen?

Voor extra ondersteuning:

- Ga naar dexcom.com en maak gebruik van de trainingen en hulpmiddelen waarmee u in uw eigen tempo extra kennis kunt opdoen
- Technische vragen/-support:
- Tel: *0800 020 1986*
- www.dexcom.com/ts-nl
- <https://dexcomtraining.com/>



Geef ons feedback!

Vul deze korte vragenlijst in en deel uw tevredenheid met deze training met ons. Wij waarderen uw tijd en feedback!



[Geef feedback](#)

Deze concepthandleiding is uitsluitend bedoeld ter illustratie. Lees altijd de indicaties, waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en instructies die bij uw Dexcom G7 CGM-systeem worden geleverd. Doet u dat niet, dan kunnen er onjuiste sensorwaarden optreden en kunt u waarschuwingen of een ernstige lage of hoge glucosewaarde missen.

Dexcom, Dexcom Share, Dexcom Follow en Dexcom Clarity zijn geregistreerde handelsmerken van Dexcom, Inc. in de Verenigde Staten en/of andere landen.
©2025 Dexcom, Inc. Alle rechten voorbehouden.
MAT-8424 Rev001